

Gebruiksaanwijzing Leeskaart^(*)

Met deze leeskaart kunt u op een eenvoudige wijze de sterkte van uw leesbril bepalen. Houdt deze kaart op 35cm afstand voor uw ogen. Vervolgens leest u zonder bril(!) onderstaande tekst van boven naar beneden.

De eerste regel die u gemakkelijk kunt lezen geeft vervolgens de benodigde leesbrilsterkte aan.

Kunt u zonder problemen deze tekst nog op 35cm afstand lezen? Goed nieuws! U heeft nog geen leesbril nodig.



Ligt deze leestest nog altijd op 35cm? Als u deze tekst dan nog kunt lezen heeft u een leesbril met een sterkte van +1.00 dpt nodig.



En hoe gaat het lezen van deze tekstregel?
Indien dit goed leesbaar is kiest u een leesbril met de sterkte +1.50 dpt.



U heeft een leesteksterkte van +2.00 dpt nodig
indien deze tekstregel op 35cm
gemakkelijk te lezen is.



Heeft u geen problemen met deze tekstregel?
Dan kiest u een leesbril met een sterkte van +2.50



Als dit de kleinste tekst is die u nog
op een afstand van 35cm kunt lezen,
heeft u een leesbril met een sterkte
van +3.00 nodig



^{*}Deze leestest is enkel bedoeld voor de bepaling van een eenvoudige leescorrectie.
De via www.optiekwereld.nl geleverde (lees)brillen zijn niet geschikt als vertecorrectie.
Wij raden u aan om uw ogen regelmatig bij een gekwalificeerde opticien te laten controleren.