



ROLLATOR

INCLUSIEF TRANSPORTTAS EN BOODSCHAPPENTAS



1

Rollator



2

Comfortabele
zit




3

In hoogte
verstelbaar




4

Wandelstok-
houder

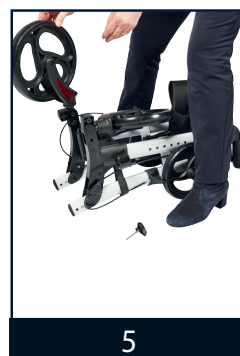

5

Opvouwbaar

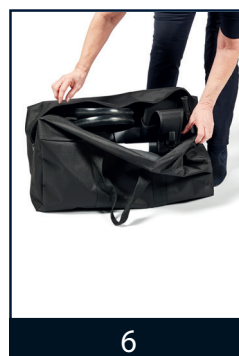

6

Makkelijk mee
te nemen

↑↓ Lengte: 87-100 cm

↔ Breedte: 63 cm

📦 8,35 kg

📦 Max. 136 kg

Stabiliteit en materialen

De Vitivity rollator heeft een sterk en licht frame en aan het ontwerp is te zien dat het gaat om een exclusief design product. Het frame is gemaakt van aluminium en weegt daarom maar 8,35 kg. Hij beschikt over een verstevigde wielophanging met opvallende reflectoren aan de zijkant, waardoor u goed zichtbaar bent. De rollator is door zijn compacte formaat voor zowel binnen als buiten goed te gebruiken.

Aluminium frame



+ Handrem



Handvaten & remmen

De rollator beschikt over handgevormde rubberen handvaten die u veel grip en comfort bieden. De remmen zijn gepositioneerd onder het handvat en beschikken over een schroef waarmee u de remmen kunt verstellen. De handrem heeft twee opties: hij kan naar boven worden getrokken om tijdens het lopen te remmen en kan naar beneden worden gedrukt om hem op de parkeerstand te zetten.

In hoogte verstellen

De handvaten van de Vitivity rollator kunnen makkelijk in hoogte versteld worden van 87-100 cm door middel van een snap-lock systeem. Zo kunt u de handvaten op de gewenste hoogte zetten. Dit doet u door middel van een drukknop aan de zijkant van het frame. U kunt deze indrukken om de duwhandvaten stapsgewijs in hoogte te verstellen. Bij het vervoeren en inklappen kunt u dus altijd gemakkelijk de handvaten naar beneden doen. Wat u een voordeel geeft, omdat hij zo compacter is.

6 x verstelbaar



+Wandelstokhouder
+Opbergtas
+Transporttas

Wandelstokhouder / Opbergen

De rollator beschikt over een wandelstokhouder, zodat u die ten alle tijden binnen handbereik heeft. Ook is de rollator makkelijk in te klappen en te vervoeren in de bijgeleverde transporttas. Door de stoffen hendel in het midden van het zitje omhoog te trekken, klapt u de rollator in. Om de rollator uit te klappen, drukt u op de uiteindes van het zitje. U hoort een klik, waarna de rollator gereed is voor gebruik.

Wielen

De voorwielen van de Vitivity rollator zijn groot en sterk, dus hij loopt gemakkelijk over een drempeltje heen en een bospad vormt ook geen probleem. Door de hardere banden, manoeuvreert hij direct en makkelijk van links naar rechts. De achterwielen zijn wat kleiner en daardoor wendbaarder.

