

ZORGWINKEL



Hulpmedi.nl



Langer zelfstandig leven
TEL: 038 - 8 44 22 40



MONTAGEHANDLEIDING

ReleveleR




Hét systeem om op een eenvoudige wijze wandclosetpotten te verhogen
met 5 of 7 cm



Inhoud van het pakket

Controleer vóór de montage van ReleveleR eerst de inhoud van de verpakking!

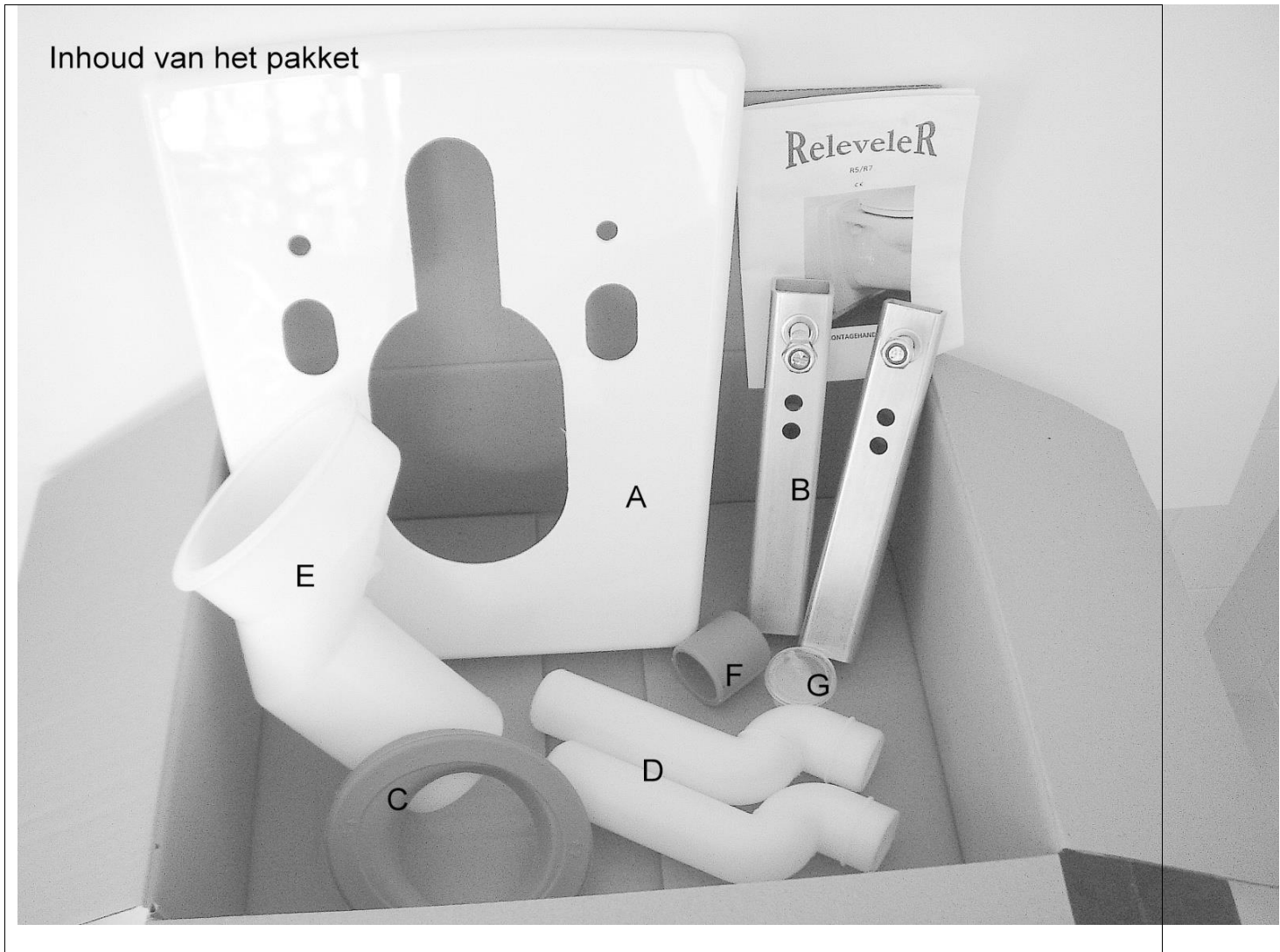

A: afdekkap

B: 2 draagbeugels + 2 moeren en 2 ringen

C: afvoermanchet instelbaar voor een verhoging met 5 of 7cm

D: 2 spoelleidingen: 1 met een verzet van 5cm, 1 met een verzet van 7cm

E: afvoerleiding

ZORGWINKEL



Hulpmedi.nl



Langer zelfstandig leven
TEL: 038 - 8 44 22 40



F: sok

G: zakje montageve

en een montagehandleiding

ReleveleR®

Dé oplossing voor het verhogen van wandclosetpotten

ReleveleR is een systeem om op eenvoudige en esthetische wijze de bestaande wandclosetpot zonder hak- en breekwerk te verhogen.

Een wandclosetpot wordt in praktijk soms te laag gemonteerd. Dit is lastig met name voor ouderen en verminderd zelfredzamen. Om een wandclosetpot te kunnen verhogen is normaal gesproken hak- en breekwerk onvermijdelijk.

Daarom is ReleveleR dé oplossing voor dit probleem, waarbij de bestaande closetpot opnieuw wordt gemonteerd.

ReleveleR is geschikt voor wandclosetpotten met een breedte tot 37 cm. De breedte wordt gemeten op de bovenkant van de bestaande wandclosetpot waar de closetpot tegen de muur aansluit. ReleveleR biedt de mogelijkheid om naar keuze de closetpot met 5 of met 7cm te verhogen.

Het monteren van ReleveleR is niet moeilijk en is met de meegeleverde montagehandleiding goed door een ervaren doe-het-zelver te doen.

Na toepassing van ReleveleR komt de bestaande wandclosetpot 4 cm extra vanaf de wand naar voren.

Indien de verhoging van de wandclosetpot niet meer nodig is dan is het mogelijk de wandclosetpot op de oorspronkelijke hoogte terug te brengen zonder dat daarbij beschadigingen optreden. Hiertoe dient men dan wel alle vrijgekomen materialen te bewaren.

Overige benodigdheden

Naast de inhoud van het pakket heeft men voor de montage de volgende gereedschappen nodig.

Rolmaat
Hobbymes
Metaalzaag
Potlood
Sleutel 19
Vijl
Kitspuit met siliconenkit
Waterpas



Figuur 1



Figuur 2

Snijd de kitvoegen door.

Ondersteun de closetpot en draai de bevestigingsmoeren los.

De moeren en ringen gebruikt u later weer om de pot opnieuw te monteren.



Figuur 3



Figuur 4

Neem de closetpot van de wand, trek de afvoer- en spoelleiding uit de wandaansluiting.

Neem de eventueel toegepaste tussenmat los, en verwijder alle kitresten.

Neem de rubberring van de losgenomen spoelleiding.

Deze ring gebruikt u later bij figuur 12 weer op de nieuwe spoelleiding (D).



Figuur 5



Figuur 6

Smeer de uiteinden van de nieuwe afvoerleiding (E) en spoelleiding (D) in met wat van het meegeleverde montagevet.

Schuif de ingesmeerde leidingen (D, E) zo diep als mogelijk in de muuraansluitingen.

Meet van beide leidingen (D, E) de afstand op tussen de wand en de aanslagpunten van de leidingen.



Figuur 7



Figuur 8

De bij figuur 6 gevonden maten geven de lengten aan die de leidingen (D, E) ingekort moeten worden.

Teken beide leidingen af .

Zaag beide leidingen (D, E) op de afgetekende maat recht af.



Figuur 9



Figuur 10

Schuin de afgezaagde uiteinden met een vijl af,
en smeer deze vervolgens in met wat montagevet.

Monteer de beide draagsteunen (B) op de bestaande vrijgekomen draagbouten verticaal en vlak tegen de wand. Voor een verhoging van **7cm** gebruikt u het **onderste** gat; voor **5cm** verhoging het **bovenste** gat.

ZORGWINKEL



Hulpmedi.nl



Langer zelfstandig leven
TEL: 038 - 8 44 22 40



Figuur 11




Figuur 12

Zet de draagsteunen (B) goed vast en hang de afdekkap (A) met de kleine gaten op de draagsteunen.

Schuif de bij figuur 4 afgenomen rubberring op de nieuwe spoelleiding (D) van 5 of 7cm. Klem de nieuwe afvoermanchet (C) op de nieuwe afvoerleiding (E). Voor een verhoging van **7cm** met de aanduiding **↑7** naar boven en voor een verhoging van **5cm** met de aanduiding **↑5** naar boven.



Figuur 13

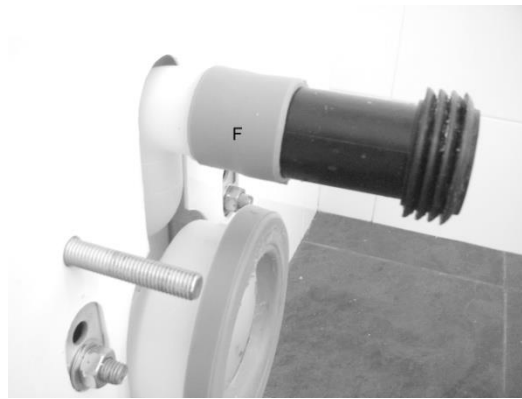

Figuur 14

Smeer beide leidingen (D, E) in met het eerder gebruikte montagevet.

Duw de leidingen (D, E) zo diep mogelijk in de wandaansluitingen met het verzet naar boven.

Bij toepassing van de Releveler bij een **verlengde closetpot** kan de spoelbuis op de juiste lengte gemaakt worden door deze te verlengen d.m.v. de sok (F) en de vrijgekomen spoelbuis .



Figuur 15



Figuur 16

Meet de lengte op van de voor de afdekkap (A) uitstekende bevestigingsbouten.

Meet aan de achterzijde van de closetpot 5 of 7 cm onder de bevestigingsgaten of er voldoende ruimte aanwezig is om de uitstekende bevestigingsbouten gemeten bij figuur 15 toe te laten.



Figuur 17



Figuur 18

Als de ruimte de lengte zoals bij figuur 16 gemeten niet toestaat, dan kunt u om beschadiging van de toiletspot te voorkomen, de overtollige lengte van de bevestigingsbouten afzagen.

Smeer de rubberring en de afvoermanchet (C) in met het eerder gebruikte montagevet.



Figuur 19



Figuur 20

Voordat u de closetpot opnieuw ophangt, kunt u de uitstekende lengte van de bevestigingsbouten opmeten. Deze kunnen te lang zijn, zodat uw eerder gebruikte afdekdoppen niet passen. Indien dat het geval is, met een metaalzaag op de benodigde maat afzagen.

Bevestig de closetpot verhoogd aan de wand.

Stel de pot recht en draai de moeren vast.



Figuur 21



Figuur 20

Bevestig de eerder afgenomen afdekdop weer.

Kit de voegen tussen closetpot, afdekkap, en wand af, met een geschikte sanitair siliconenkit.

De leverancier garandeert dat het geleverde product voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat zij vrij zijn van alle gebreken. Deze garantie geldt gedurende een periode van twaalf maanden na levering.

Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of door ondeskundige montage van het aan gebruiker geleverde product.

Releveler[®] staat geregistreerd als medisch hulpmiddel klasse I onder nummer NL-CA001-2010-3036536.

Bel voor montage of vragen :

ZORGWINKEL
Hulpmedi.nl
Langer zelfstandig leven
TEL: 038 - 8 44 22 40

