



Gebruiksaanwijzing

Lees deze informatie zorgvuldig door;
het helpt u WET-COMOD® op de juiste manier te gebruiken.

WET-COMOD®

Povidon 2%

Bij vermoeidheid of gevoel van droogheid van de ogen, veroorzaakt door bijv. intensief werken aan de computer of langdurig televisiekijken
Steriele, fosfaatvrije oplossing zonder conservermiddel

Wat is WET-COMOD®?

WET-COMOD® is een steriele, conservermiddelvrije oplossing met povidon 2%, een bijzonder goed te verdragen stof, die de viscositeit van de oplossing verhoogt. Verder bevat WET-COMOD® sorbitol, natriumhydroxide, een citraatbuffer en water.

Waarvoor gebruikt men WET-COMOD®?

Bij vermoeidheid of gevoel van droogheid van de ogen, veroorzaakt door bijv. intensief werken aan de computer of langdurig televisiekijken.

Wanneer dient men WET-COMOD® te gebruiken?

Bij intensief werken aan een computer of langdurig televisiekijken worden de ogen sneller moe, omdat u bij geconcentreerd kijken minder vaak met uw ogen knippert. Omdat uw ogen langer open zijn, wordt de traanfilm niet zo vaak over het oog verdeeld. Dit is echter noodzakelijk om de oogweefsels vochtig te houden en zodoende volledig te laten functioneren. Bij geconcentreerd kijken, bijvoorbeeld op een computer- of een televisiebeeldscherm kan daarom de natuurlijke tranenfilm worden onderbroken. Ten gevolge daarvan drogen de ogen droog aan, jeukend en branden ze, of men heeft het gevoel zand in de ogen te hebben.

WET-COMOD® vormt een gelijkmatige, stabiele film op het oogoppervlak en beschermt door deze fysieke eigenschap tegen een gevoel van droogheid, vermoeidheid en irritatie van de ogen. Daardoor worden de symptomen onmiddellijk verlicht. Door de verhoogde viscositeit van de oogdruppels duurt dit aangename effect langer. Toch verdeelt WET-COMOD® goed en snel over het oogoppervlak en wordt het gezichtsvermogen niet beïnvloed. WET-COMOD® kan tijdens het dragen van harde of zachte contactlenzen worden toegepast en verhoogt het draagcomfort ervan.

Omdat WET-COMOD® geen conservermiddelen bevat, wordt het ook bij langdurig gebruik bijzonder goed verdragen.

Hoe gebruikt men WET-COMOD®?

Afbeelding 1:

Neem voor gebruik steeds de dop af.





Afbeelding 2:

Houd de flacon voor het eerste gebruik van WET-COMOD® verticaal met de druppeltuit naar beneden en druk zo vaak op de bodem van de flacon tot de eerste druppel aan de tuit verschijnt. De flacon is daarna gereed voor de volgende keren dat het gebruikt wordt.

Houd de flacon met de druppeltuit naar beneden met de duim op de schouder van de flacon en de andere vinger op de bodem ervan.

Afbeelding 3:

Ondersteun uw hand met de COMOD®-flacon met uw andere hand, zoals in de afbeelding.

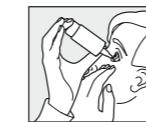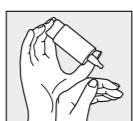

Afbeelding 5:

Sluit na gebruik de druppeltuit direct en zorgvuldig met het dopje af. Zorg ervoor dat de druppeltuit droog is. Vermijd het contact tussen de druppeltuit en uw oog of de huid van uw gezicht.

Het product levert circa 10 ml oplossing; dit komt overeen met ongeveer 300 druppels. Om productietechische redenen blijft altijd een kleine vloeistofrest in de flacon achter.

De gebruikstijd van WET-COMOD® is niet beperkt.

Met de inhoud van een flacon WET-COMOD® dient altijd slechts één persoon te worden behandeld.

Welke verdere instructies voor het gebruik dient u in acht te nemen?

WET-COMOD® dient niet direct voor of na toediening van oogmedicatie worden gebruikt, maar met een pauze van tenminste 30 minuten tussen beide toedieningen. Oogzalven moeten in ieder geval na WET-COMOD® in de bindvleeszak worden gestreken.

Voor zover bekend, mag WET-COMOD® zonder beperking, zowel bij kinderen als bij zwangere vrouwen en borstvoedende moeders worden gebruikt.

Hoe vaak en hoe lang dient men WET-COMOD® te druppelen?

WET-COMOD® moet individueel, volgens eigen bevinden en advies van uw oogarts of contactlenzenspecialist, gedoseerd worden. In het algemeen druppelt u 4 à 5 maal daags 1 druppel WET-COMOD® in de bindvleeszak van beide ogen. Bij sterke klachten kan WET-COMOD® meerdere keren dagelijks gedruppeld worden. Mocht u WET-COMOD® vaker (bijv. meer dan 10 maal daags) gebruiken, laat uw ogen dan door een oogarts onderzoeken. WET-COMOD® is geschikt voor permanent gebruik, maar u dient - net als bij andere aandoeningen - bij langdurig aanhoudende klachten een oogarts te raadplegen.

Wanneer mag men WET-COMOD® niet gebruiken?

WET-COMOD® mag niet gebruikt worden bij overgevoeligheid voor een van de bestanddelen.

Welke instructies moeten in acht genomen worden voor het bewaren van WET-COMOD®?

Bewaren bij kamertemperatuur.

Na openen van een flacon kan WET-COMOD® 6 maanden gebruikt worden.

Niet gebruiken na afloop van de vervaldatum ().

Buiten bereik van kinderen bewaren.

De volgende verpakkingsgroottes zijn verkrijgbaar:

10 ml oogdruppels

Stand van de informatie:

Maart 2012

Producent ():

URSAPHARM, Industriestraße, 66129 Saarbrücken, Duitsland

Tel.: +49 (0) 6805/92 92-0, Fax: +49 (0) 6805/92 92-88

E-mail: info@ursapharm.de, www.ursapharm.de

Voor informatie en vragen:

URSAPARM Benelux B.V. NL-5700 AD Helmond

Tel.: +31 492 472 473, Fax: +31 492 472 673

E-mail: info@ursapharm.nl, info@ursapharm.be

CE 0197 STERILE A



URSAPHARM

32.2759

CBB

Produkt: PB WET-COMOD 10 ML BE/NL/LU (CTP)
Art.-Nr.: 32.2759
Format: 296 x 200 mm (Plano)
Material: Offset 60 g (UPM Fine, Fa. Nordland)

Farben: Schwarz (1/1-fbg.)
Code: 1400

1. Ausfertigung vom 14.05.12

URSAPHARM

Freigabe Vertriebspartner Released Sales Partner	Name	Datum/Date	Unterschrift/Signature
Freigabe Exportabteilung Released Export Department	Name	Datum/Date	Unterschrift/Signature
Freigabe Zulassung Released Regulatory Affairs	Name	Datum/Date	Unterschrift/Signature

