

7



Stop de afdruk in de grote plastic zak.

Herhaal het hele proces met de onderkaak, indien nodig.

8



Stop de gebitsafdruk respect. de afdrukken samen **MET het afleveringsbewijs** in de kleine, vierkante retourverpakking. Indien u het afleveringsbewijs niet meestuurt, kan het tandheelkundig laboratorium het product voor u niet in de juiste maat maken. Dit is uw bewijs van aankoop en opdrachtbevestiging voor het tandheelkundig laboratorium.

Het is belangrijk, dat u uw pakket voldoende frankeert en bij het postkantoor afgeeft. In het andere geval worden achteraf kosten in rekening gebracht.



Belangrijke punten

- » Gebruik het afdruk materiaal **binnen 2 dagen** om te voorkomen, dat de pasta uithardt.
- » **Verwijder de afdruk niet van de lepel**, omdat het laboratorium dan geen juiste maat meer kan maken.
- » Indien u merkt dat de **afdruk niet goed gelukt is**, verstuur deze dan niet. Neem dan contact met de klantenservice op.
- » Let er goed op, dat het pakket dat u terugstuurt **voldoende gefrankeerd** is. Dit kunt u eenvoudig bij het postkantoor regelen.



Klantenservice

Indien u nog vragen en opmerkingen over de gebruiksaanwijzing of over het maken van de gebitsafdruk heeft, neemt u dan a.u.b. contact met de klantenservice op.

Uw praktijkteam

Zelf een gebitsafdruk maken

GEBRUIKSAANWIJZING



Voor u begint:
Eerst deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen.

Binnen 2 dagen een gebitsafdruk maken!

Zo voorkomt u het hard worden van de pasta.

Nodig:

- » Handddoek
- » Stopwatch / Horloge



1



Was uw handen en droog ze goed af. Ga voor een spiegel zitten.

2

Let goed op, welke lepel u voor de boven- en onderkaken moet gebruiken. Test door middel van bijten op de droge lepel, welke kleur het beste past.



BOVENKAAK



ONDERKAAK



3

Haal de witte en gekleurde pasta uit het plastic zakje en kneed ze beide samen totdat de pasta **een kleur aanneemt (niet langer dan 45 seconden kneden omdat de massa anders te vast wordt)**. Rol de pasta tot een worst.



max
45
Sek.




Plaats de gevormde pasta in de afdruklepel voor de bovenkaak. Let er goed op, dat de pasta voornamelijk over de voortanden verdeeld is. Druk de pasta met de afdruklepel in een rechtstreekse beweging plat op de bovenkaak. Plaats uw lippen over de afdruklepel en druk de lepel goed aan. Het tandvlees moet hierbij aangeraakt worden – op deze manier bevinden voortanden en kiezen zich diep genoeg in de afdrukmassa.



Tijdens het uitharden mag de lepel niet bewegen. Houd de lepel stil in de mond, bijt niet uw tanden samen en houd uw hoofd recht. Adem langzaam door de neus in en uit en slik niet. Houd een handdoek in de buurt om eventueel speeksel op te vangen.

4

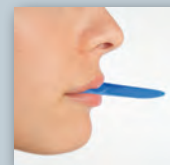

3
Min.

Neem de afdruklepel met de afdruk na **3 minuten** uit de mond en spoel de afdruk onder **koud, stromend water** af. Laat de afdruk op de lepel.



Haal de afdruk **NOOIT** uit de lepel.

5

Controleer op de afdruk of de afdrukpasta een uniforme kleur heeft en of de tanden goed in de afdruk zichtbaar zijn en zich diep genoeg in de afdrukpasta bevinden.



AFDRUK NIET
DIEP GENOEG

GEEN UNIFORME
KLEUR

6