



1

- Handen wassen en goed afdrogen
- Controleer of de afdruklepels in uw mond passen, voordat u gaat beginnen



2

- Haal nú de witte en de blauwe afdrukmassa uit de plastic zakjes



3

- Meng de witte en de blauwe afdrukmassa stevig met uw handen totdat u een mooie egale kleur heb gekregen (max. 40 sec.)



4

- Rol de afdrukmassa in de vorm van een worstje



5

- De afdrukmassa tegen de rand van de lepel aanbrengen, zorg dat bij de voortanden meer zit dan bij de kiezen.



6

- Stop nú de afdruklepel in uw mond.
- Probeer met uw voortanden in het midden van de afdruklepel te bijten
- Sluit nu uw mond, zodat uw tanden helemaal in de afdrukmassa verdwijnen.



7

- Houdt de afdruklepel op zijn plaats
- Na 3 minuten is de afdrukmassa uitgehard en kan u de afdruklepel uit de mond halen.



8

- U kunt de afdruklepel met het handvat naar beneden drukken, lukt dit niet, dan kunt u met uw vingers achter bij je kiezen de lepel los drukken.



9

- Stop de afdruklepel mét de ingevulde persoonlijke gegevens in de retour envelop en verstuur deze per post.
- Uw werkstuk ontvangt u binnen 3 werkdagen