



Move Light rollator

De Move Light rollator is een inklapbare rollator met vier wielen voor gebruik binnen- en buitenshuis, met zwenkwielen aan de voorkant.

Schade door transport

Neemt u direct contact op met uw dealer wanneer uw Move Light rollator enigerlei schade heeft opgelopen gedurende het transport.

Uitvouwen / inklappen

De rollator is makkelijk mee te nemen. U klapt de zitting omhoog, verwijdert het mandje en trekt aan het trekkoord (waarmee de stang omhoog wordt getrokken). Wanneer u de rollator weer wilt gebruiken duwt u de stang weer naar beneden waardoor de rollator zich vergrendeld en plaatst eventueel het mandje terug. Nadat de zitting is teruggeklapt is de rollator weer geschikt voor gebruik.

! Let op bij uitvouwen en het vergrendelen van de rollator dat uw vingers niet bekneld raken!

De Move Light rollator wordt geleverd zonder de handgrepen in het frame gemonteerd. De rollator dient te worden uitgeklaapt voordat de handgrepen worden aangebracht. Breng de grepen aan (zie afbeelding).

Instellen hoogte duwgrepen

De hoogte van de duwgrepen is instelbaar door middel van de sterknop onder de duwgrepen. U neemt de sterknop af en vervolgens kunt u het boutje terugduwen of uitnemen. Nu kunt u de hoogte van de duwgrepen bepalen. Het boutje dient weer in het zeskantige gaatje in de buis teruggeplaatst te worden. Daarna kan de sterknop weer aangebracht worden, met handkracht vastdraaien. De rechter en linker duwgreep moeten op gelijke hoogte ingesteld worden.


Hierna dient de rugleuning te worden gemonteerd. Dit doet u door de knoppen van de rugleuning in te drukken en daarna de buizen (links en rechts gelijktijdig) in elkaar te schuiven. Controleer of de vergrendelpinnen in de gaatjes geklikt zijn. Onder de zitting kan desgewenst het mandje worden geplaatst.

Remmen

Quick-rem

-wanneer u wilt remmen, knijpt u (voorzichtig) in de handrem.

-vastzetten van de rem: duw de handrem zover mogelijk naar beneden.

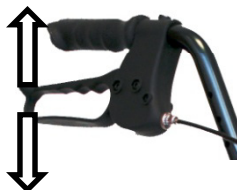

Tijdens het lopen met de rollator kunt u gebruik maken van de rem. Door de remhendel naar boven te drukken remt de rollator af. Wanneer u gebruik wilt maken van de parkeerrem dient u de duwgrepen (voorzichtig) naar beneden te drukken. Deze rem gebruikt u als u bijvoorbeeld wilt gaan zitten op het zitje van de rollator. U voelt een lichte weerstand en / of hoort een lichte klik bij het naar beneden drukken van de duwgreep. Wanneer u weer verder wilt lopen trekt u de duwgreep weer naar boven toe waardoor de remmen ontgrendelen.



Boodschappenmandje

Het boodschappenmandje is alleen geschikt voor het dragen van boodschappen, het mag niet overbelast worden. Maximale belasting is 5 kg.



Zitje

Wanneer u op de zitting van de rollator plaats wilt nemen moet u eerst het volgende in acht nemen; de rollator moet zich op een stabiele en vlakke ondergrond bevinden. De remmen moeten vastgezet worden door middel van de parkeerrem. Kijkt u altijd of de rollator correct geplaatst is en of de rollator stabiel staat voordat u daadwerkelijk plaatsneemt.



Altijd loodrecht op het zitje plaatsnemen! Niet leunen of schuin op het zitje plaatsnemen. Alle wielen moeten recht op de grond staan.



Veiligheidsvoorschriften

De rollator alleen in gebruiksklare toestand gebruiken. Voordat u gebruik maakt van de rollator, moet eerst gecontroleerd worden of de sterknoppen goed vastgedraaid zijn.



De rollator alleen op een vaste solide ondergrond gebruiken. Het is verstandig niet met uw rollator over roosters of rioolputten te rijden, omdat de banden dan in geulen of groeven kunnen blijven steken. Wij raden aan om nooit scheef stoeien op en af te rijden.



Dan kan het frame van uw rollator geheel verbuigen omdat er alleen kracht op een enkel wiel wordt uitgeoefend.

Beide handgrepen dienen gelijk belast te worden, evenals de handremmen.



Vooral wanneer u achteruit rijdt. Moet u voorzichtig remmen. Dit in verband met kiepgevaar. Op een vochtige, ijzige of besneeuwde ondergrond bestaat het risico uit te glijden en is de remfunctie beperkt. U kunt de remmen van de rollator zelf op uw wensen aanpassen.

De rollator mag niet overbelast worden. Het maximaal te transporteren gewicht is 5 kg. Maximaal gebruikersgewicht is 100 kg. Wanneer de rollator stilstaat is het raadzaam de remmen te vergrendelen.

Let op dat in de zon, hete of koude omgeving de temperatuur van de rollator hoog of laag kan zijn, speciaal bij het gaan zitten op de zitting.

Onderhoud en service

De rollator kan eenvoudig gereinigd worden met een mild reinigingsmiddel. Na het reinigen dient de rollator goed afgedroogd te worden. Uw rollator is verder vrijwel onderhoudsvrij.

De remmen dienen voor ieder gebruik te worden gecontroleerd op juiste werking. Uw leverancier kan deze desgewenst afstellen.

Controleer ook regelmatig op algehele staat van de rollator zoals speling, stabiliteit, beschadiging, loszittende delen. In geval van twijfel: gebruik de rollator niet en neem contact op met uw leverancier.

Technische gegevens

Breedte	63 cm
Hoogte verstelbaarheid	81 - 92 cm
Zithoogte	58 cm
Wielgrootte	200 x 30 mm
Max. gebruikers gewicht	100 kg
Totaal gewicht	7,5 kg



Thuasne Nederland BV
Klompemaker 1-3
3861 SK Nijkerk GLD Nederland



Move Light rollator

Der Move Light ist ein einfach zusammenfaltbarer Rollator mit vier Rädern den Sie überall mit hinnehmen können, die beiden Vorderräder sind schwenkbar.

Transportschaden

Sollte Ihr Rollator einen Transportschaden aufweisen kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Fachhändler.

Auseinander- / Zusammenklappen

Zum Zusammenklappen heben Sie den Sitz an, entfernen Sie den Korb und ziehen Sie an dem Band (zum Aufrichten des Rohrs). Der Rollator kann so bequem transportiert werden

Wenn Sie den Rollator wieder benutzen wollen drücken Sie das Rohr für die Blockierung des Rollators nach unten bis der Rollator komplett entfaltet ist und setzen den Korb wieder ein. Den Sitz herunterklappen und auf das Verriegelungssystem aufsetzen. Der Rollator kann jetzt wieder verwendet werden.



Beim Ausklappen und Blockierung des Rollators darauf Acht geben, dass Ihre Finger nicht eingeklemmt werden.

Der Move Light wird nicht fertig montiert geliefert. Die Handgriffe müssen noch gemäß der Abbildung in die Rahmenrohre eingeführt werden. Vor der Montage den Rollator auseinander klappen.

Einstellung der Griffhöhe des Rollators

Die Höhe der Schiebegriffe ist mittels des Sternknopfes unterhalb der Schiebegriffe einstellbar. Schrauben Sie den Sternknopf ab und nehmen Sie den Bolzen an der anderen Seite des Rohres heraus. Jetzt können Sie die Höhe der Handgriffe einstellen. Anschließend muss der Bolzen wieder in die sechseckige Öffnung eingesetzt und der Sternknopf manuell festgedreht werden. Der rechte und linke Schiebegriff müssen auf gleicher Höhe fixiert werden.


Anschließend wird die Rückenlehne montiert. Dies erfolgt durch Drücken der Knöpfe der Rückenlehne und gleichzeitiges Ineinanderschieben der Rohre rechts und links. Überprüfen Sie, ob die Sicherungsstifte in die Löcher eingerastet sind.

Bremsen

Quickbremse

Zum Bremsen ziehen Sie den Bremshebel nach oben in Richtung Handgriff

Zum Feststellen der Bremsen drücken Sie den Bremshebel so weit wie möglich nach unten

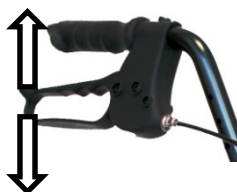

Für die Parkbremsfunktion drücken Sie die Bremsgriffe vorsichtig so weit nach unten, bis diese eingerastet sind. Diese Bremsfunktion benutzen Sie, wenn Sie sich z. B. auf den Sitz des Rollators setzen möchten. Zum Weitergehen ziehen Sie die Bremsgriffe wieder nach oben, um die Bremsen zu lösen.

Einkaufskorb

Der Einkaufskorb ist ausschließlich für den Transport von Gegenständen geeignet und darf nicht überlastet werden. Maximale Belastung: 5 kg.

Sitz

Vor der Benutzung des Sitzes beachten Sie bitte die folgenden Punkte:



Der Rollator muss auf einer festen und ebenen Oberfläche stehen. Die Bremsen müssen mittels der Parkbremse festgestellt werden.

Achtung

Bevor Sie auf dem Sitz des Rollators Platz nehmen versichern Sie sich bitte unbedingt, dass die Bremsen festgestellt sind.

Setzen Sie sich immer senkrecht auf den Sitz, lehnen Sie sich nicht zur Seite und setzen Sie sich nicht schräg auf den Rollator.



Der Sitz des Rollators ist lediglich zur Unterstützung für kurze Dauer bestimmt und erfüllt nicht die Funktion eines Stuhls.

Den Rollator nur in ausgeklapptem Zustand benutzen.



Vor jedem Gebrauch prüfen, ob die Bremshebel fest angezogen und senkrecht nach unten gestellt sind.



Den Rollator nur auf fester und ebener Oberfläche benutzen. Die Reifen können sich in Rillen oder Bodenvertiefungen verhaken – daher Kanaldeckel, Gitterroste und ähnliche Hindernisse bitte weiträumig umfahren.



Stets beide Handgriffe gleichmäßig belasten und beide Bremsen gleichmäßig betätigen.

Besonders beim Rückwärtsfahren sehr behutsam bremsen.

Auf verschmutztem, feuchtem, vereistem oder verschneitem



Boden besteht Rutschgefahr und die Bremsenwirkung ist eingeschränkt.

Den Rollator nicht überladen! Das maximale Zuladungsgewicht für Gepäck beträgt 5 kg!

Wird der Rollator nicht benutzt, sichern Sie ihn stets durch Feststellen der Bremsen gegen Wegrollen.

Berücksichtigen Sie, das bei Sonneneinstrahlung sowie in heißer oder kalter Umgebung der Rollator entsprechend hohe oder niedrige Temperaturen annehmen kann. Besonders beim Platznehmen auf dem Sitz darauf achten.

Wartung

Der Rollator kann mit einer milden Seifenlauge sowie haushaltsüblichen Reinigungsmitteln von Hand gesäubert werden.

Vor jedem Gebrauch des Rollators sind die Bremsen auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen. Ihr Fachhändler kann die Bremsen auf Wunsch entsprechend einstellen.

Überprüfen Sie auch regelmäßig den Allgemeinzustand des Rollators wie z. B. Spiel, Stabilität, Schäden oder lose Teile. Im Zweifelsfall den Rollator nicht benutzen und Kontakt mit Ihrem Fachhändler aufnehmen.

Technische Daten

Breite	63 cm
Höhenverstellbarkeit	81- 92 cm
Sitzhöhe	58 cm
Rädergröße	200 x 30
Maximale Belastung	100 kg
Gesamtgewicht	7,5 kg

Thuasne Deutschland

Hauptstraße 16, 35099 Burgwald



Thuasne Nederland BV
Klompemaker 1-3
3861 SK Nijkerk GLD Nederland