


flexyfoot

Zelfverzekerdheid Veiligheid Stijl

Spikes gebruiksaanwijzing

Lees en bewaar alstublieft deze instructies

- De Spikes bevatten roestvrijstalen tanden welke voor extra grip zorgen in sneeuw en op ijs en past op het vernieuwde Flexyfoot loopvlak (met cirkels).
- U kunt de meegeleverde beschermingsdop over de Spikes plaatsen ter bescherming tijdens opslag of bij kortdurend gebruik binnenshuis. Gebruik de dop niet buiten, deze biedt niet dezelfde mate van grip als het Flexyfoot loopvlak.
- Gebruik de Spikes enkel op ijs en in sneeuw. De mate van grip is afhankelijk van de ondergrond, het type hulpmiddel en de wijze van gebruik. Er is geen garantie op de mate van grip die de Spikes u zal bieden.

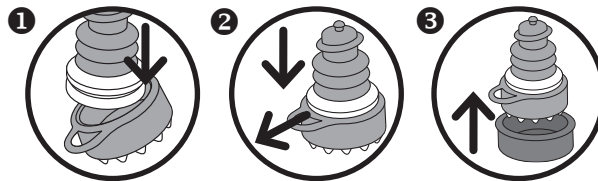

Spikes bevestigen

- 1 Om te bevestigen, positioneer de rand van de Spikes in de gleuf van het Flexyfoot "voetstuk".
- 2 Trek aan het lipje en druk de Flexyfoot zodanig in de Spikes dat de rand volledig in de gleuf van het voetstuk zit.
- 3 Om de beschermingsdop toe te passen duwt u deze stevig over de Spikes.

Fabrikant: **Flexyfoot Ltd** Postbus 1390, Woking, Surrey, GU22 2LB, United Kingdom
Importeur Benelux: **Skyline Mobility BV** Gildeweg 22, 2632 BA Nootdorp, Nederland
T +31 (0)15 82 00 320 E info@skylinemobility.com I www.skylinemobility.com

Flexyfoot is beschermd door patentrecht en geregistreerd design
Flexyfoot Nederlandse instructies voor Spikes 540 - Web 01 Datum van uitgave 2016