



Gebruikersinstructie CRYO MEDIC

- Neem voor elke aantip een **nieuw wattenstaafje**, dan pas de dip!
- Plaats geen besmet materiaal in het vaatje (fig.1)!!!
- **Pas op**, langzaam de dipper in het vaatje onderdompelen i.v.m. stikstof spetters
- De met stikstof gevulde dipper kunt u op een tafel leggen (fig.3) of u kunt deze op de rand van het vat plaatsen tijdens de behandeling (fig.2)
- Vergeet niet de dop terug te plaatsen in het vat na de behandeling
- De dipper kunt u na gebruik buiten het vat bewaren (het beste ophangen), deze past niet in het vaatje
- Gooi **nooit** de overtollige stikstof wat nog in de dipper zit terug in het vaatje
- Bij het verplaatsen van het vaatje, deze steeds zachtjes op de grond zetten
- Houd het vaatje, zowel de binnen- als buitenkant, schoon
- Controleer regelmatig de werking van het zuurstofalarm (indien van toepassing)
- Aanvullende informatie en manuals vindt u op onze website www.cryosolutions.nl /Cryo Medic (Artsen)/Cryo Medic: downloadcentrum



fig. 1



fig. 2

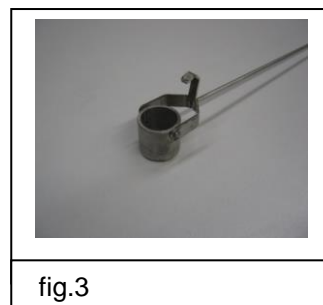


fig.3