

Kendall™ Hydrogel Tepelverbanden



Formerly known as Mothermates

Te gebruiken bij pijnlijke en/of geïrriteerde tepels, tepelkloven ten gevolge van het geven van borstvoeding.

- bevordert de wondgenezing
- eenvoudig aan te brengen en te verwijderen
- uitspoelbaar en enkele dagen bruikbaar
- compleet veilig voor moeder en kind
- aanbevolen door lactatiekundigen wereldwijd
- breng koel aan voor maximaal effect.



Kent u ook de Kendall™
Cool Comfort Perineum Pads?



Kendall™ Hydrogel Tepelverbanden



Formerly known as Mothermates

Ervaat u ongemakken tijdens het geven van borstvoeding, bespreek dit met uw begeleider bij borstvoeding of neem contact op met een lactatiekundige. Zij kunnen u informatie geven en helpen om de juiste manier van aanleggen te leren. Voor veel nieuwe moeders die moeilijkheden ondervinden, zijn kleine wijzigingen in de manier van aanleggen gecombineerd met het gebruik van Mother Mates™ voldoende om de problemen op te lossen.



- 

1. Was uw handen voordat u het Kendall tepelverband hanteert.
- 

2. Maak de verpakking open en neem het tepelverband van het dragerfolie. Bewaar dit folie.
- 

3. Plaats het tepelverband op uw hand met de de "cup"-zijde naar boven.
- 

4. Plaats het verband op de tepel tot de volgende voeding. Breng koel aan voor een extra pijnverlichting.

Kendall Hydrogel Tepelverbanden zijn verkrijgbaar bij: