

LilyPadz®

Gebruiksaanwijzing & onderhoudsinstructies

Lees deze aandachtig door voor in gebruik name van de LilyPadz

Hartelijk gefeliciteerd! Met LilyPadz heeft u de nieuwste generatie zoogcompressen in handen. We wensen u en uw baby een fijne borstvoedingsperiode!

Verpakkingsinhoud:


- 1) 1 bewaardoosje
- 2) 2 bewaarschildjes
- 3) 2 zoogcompressen
- 4) 1 gebruiksaanwijzing

Hoe werken LilyPadz?

LilyPadz werken volgens het eeuwenoude principe dat druk op de tepel (zoals van een vinger) tijdelijk het lekken van melk tegengaat. Doordat de druk van buitenaf groter is dan de druk vanuit de borst, zal er geen moedermelk gelekt worden. LilyPadz handhaven de druk die uitgeoefend wordt op het moment van aanbrenge. Deze druk bepaalt uiteindelijk het succes.

Wanneer de melkproductie nog niet in balans is met de drinkbehoefte van uw baby kan het voorkomen dat de druk van binnenuit groter wordt dan buitenaf. Er bestaat dan een kans op doorlekken. Het is daarom aan te raden in deze periode, tussen de voedingen door, de LilyPadz even opnieuw aan te brengen. LilyPadz kunnen niet gebruikt worden om voedingen over te slaan.

Hoe breng ik LilyPadz aan?

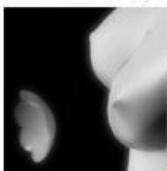

Heel gemakkelijk!
Keer de LilyPadz binnenste buiten met de plakkerige kant naar uw huid. Wees er zeker van dat uw borst en de LilyPadz droog en schoon zijn.



Plaats de LilyPadz op de melkuitgangen van de tepel. Druk de LilyPadz vervolgens stevig op de tepel*.)



Met de tepel ingedrukt, strijkt u de LilyPadz glad over de borst en verwijdert u de luchtbelletjes.



Verwijder eenvoudig als u gaat voeden en breng, na reiniging, droog weer aan.

*) LilyPadz houdt de druk die wordt gebruikt tijdens het opbrengen vast. De mate van druk die je gebruikt is bepalend voor het succes. Geef stevige druk en vermijd luchtbelletjes.

Hoe reinig ik de LilyPadz?

Verwijder voor het gebruik en het schoonmaken de LilyPadz van de transparante bewaarschildjes. Door het gebruik van LilyPadz zullen huidschilfers, huidvet en dergelijke op de LilyPadz achterblijven. Deze kunnen de plakkracht nadelig beïnvloeden. Daarom is het belangrijk de LilyPadz goed schoon, vet- en stofvrij te houden. Reinigen gaat het beste met een olievrije, crèmevrije en lotionvrije zeep. Ontvettende zeep (bijvoorbeeld afwasmiddel) geven het beste resultaat.

Was de LilyPadz minimaal 1x per dag met zeep (zie boven) en warm water. Wrijf tijdens het wassen de plakkerige zijde van de LilyPadz tegen elkaar of ga er met uw vingers overheen om huidschilfers, huidvet en dergelijke te verwijderen.

Goed afspoelen met warm water. Schud het water van de LilyPadz en laat ze aan de lucht drogen in een stofvrije omgeving. (Gebruik eventueel een föhn.)

Droog de LilyPadz niet af met een handdoek, keukenrol of iets dergelijks. Hierdoor kunnen er weer stoffen en pluisjes op de LilyPadz achterblijven die de plakkracht nadelig beïnvloeden.


Indien uw kraanwater veel mineralen of ijzer bevat, raden wij u aan LilyPadz te wassen met gedestilleerd of zacht water.

Hoe bewaar ik mijn LilyPadz?

Als u de LilyPadz niet gebruikt, bewaar ze dan, na schoonmaken op de bewaarschildjes geplakt in het doosje.

Kan ik LilyPadz desinfecteren?

Indien nodig kunt u de LilyPadz desinfecteren door ze 1 uur te weken in een bakje met 50% water en 50% azijn. Was ze hierna goed met zeep en spoel goed na met warm water. Door uitkoken of het gebruik van de magnetronsterilisator zal de levensduur van LilyPadz verkort worden. Slijtage hierdoor veroorzaakt valt niet onder de productgarantie.

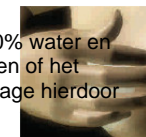

Kan ik tepelzalf gebruiken?

Het gebruik van tepelzalf kan de plakkracht nadelig beïnvloeden. Gebruik zalf spaarzaam en alleen op de tepel en areola.

Kan ik LilyPadz gebruiken tijdens het voeden op de andere borst?

Ja, dat kan. Echter het kan voorkomen dat de door de toeschietreflex de melkdruk zo groot wordt, dat de LilyPadz losraakt en als gevolg daarvan doorlekt. Veelal kan dit voorkomen worden door vóór het voeden de LilyPadz opnieuw aan te brengen en eventueel met de pols wat extra druk te geven.

Productgarantie

Indien u de bovenstaande instructies opvolgt, zult u lang plezier hebben van uw aankoop. Productgarantie tot twee maanden na aankoop en op vertoon van aankoopbewijs.

Voor meer informatie kijk op www.lilypadz.nl

Sommige vrouwen kunnen een lichte irritatie ervaren bij de eerste keren gebruik van LilyPadz. Dit verdwijnt naar enkele keren gebruik. Waarschuw anders de huisarts. Product en verpakking buiten bereik van kinderen bewaren.



Made of 100% Silicone
Made in the USA

Geïmporteerd door:
PrettyMum Trading BV
Postbus 36166
1020 MD Amsterdam
Nederland