



Reinigungsanleitung:

1. Nach jedem Gebrauch: Hände waschen, alle Teile (Mit Ausnahme des Schlauches und der Membrankappe!) mit klarem Wasser (20°C) abspülen. Danach mit Wasser (30°) und Geschirrspülmittel reinigen. Abermals mit klarem Wasser spülen (20°C) und mit einem sauberen Tuch trocknen. Alternativ im Geschirrspüler reinigen. Vorsicht bei färbenden Lebensmittelresten.
2. Einmal täglich: Zuerst alle Teile (Mit Ausnahme des Schlauches und der Membrankappe!) reinigen wie in 1. beschrieben, dann 5 Minuten abkochen (Die Teile müssen völlig mit Wasser bedeckt sein). Es kann bei sehr hartem Wasser ein Esslöffel Zitronensäure hinzugegeben werden. Alternativ im Dampfsterilisator oder in der Mikrowelle mit den Medela Quick Clean Beuteln desinfizieren.

Aufbauanleitung:



1. Stecke die weiße Membrane sorgfältig auf den Ventilkopf bis sie einrastet



2. Stecke die fest Brusthaube auf das Verbindungsstück



3. Stecke den Ventilkopf mit der weißen Membrane auf das Verbindungsstück. Bitte seitlich positionieren



4. Schraube die Flasche auf das Verbindungsstück, so dass sich der gelbe Ventilkopf mit der weißen Membrane in der Flasche befindet



5. Stecke den Schlauch in die entsprechende Anschlussöffnung im Verbindungsstück



6. Lege die Schutzmembran auf eine flache Unterlage und drücke die Membrankappe vorsichtig fest bis sie einrastet



Milchwiese GmbH
Königin-Elisabeth-Straße 1
14059 Berlin-Charlottenburg

Telefon 030 89 40 20 44
Fax 030 89 40 20 46
E-Mail info@milchwiese.de
Website www.milchwiese.de



7. Stecke den Schlauchadapter fest in die Öffnung der Membrankappe



8. Öffne den Deckel der Milchpumpe durch drücken des ovalen, weichen Knopfes. Jetzt kannst Du den Deckel anheben



9. Setze die Membrankappe fest auf die Milchpumpenmembrane. Zentriere den Schlauchanschluss in der Aussparung im Pumpengehäuse. Die Kappe muss bündig aufliegen



10. Pumpen
An das Stromnetz anschließen!
Zur Initiierung der Milchbildung...
Initial: linken Knopf drücken, nach 10 Sek. den rechten Knopf drücken



11. Brusthaube so aufsetzen, dass die Brustwarze zentriert im Tunnel liegt. Achte auf die richtige Brusthaubengröße!



12. Vakuum einstellen. Erhöhen durch nach rechts drehen, reduzieren durch nach links drehen. Das Pumpen sollte nicht schmerzen!

Milchproduktion aufbauen und aufrecht erhalten mit...

Erhaltung: linken Knopf drücken, die Pumpe läuft automatisch weiter



Milchwiese
Für eine gesunde Stillzeit