



Going further  
for health

# Veroval Medi.connect

Beknopte handleiding

SH  
7/6/17

# Inhoudstafel

1. Veroval®-medi.connect installeren Pagina 3
2. Uw bloeddrukmeter installeren Pagina 14
3. Uw ECG installeren Pagina 21
4. Uw personenweegschaal installeren Pagina 28
5. Uw gegevens online synchroniseren Pagina 36
6. Uw gegevens delen Pagina 38
7. De parameters van uw gezondheid manueel invoeren Pagina 43

Ga naar [www.veroval.be](http://www.veroval.be) en klik op medi.connect

The image shows a screenshot of the Veroval website homepage. At the top left is the HARTMANN logo. To its right are navigation links: 'Producten', 'FAQ', and 'medi.connect'. Further right are links for 'België', 'Medi.connect Login', and 'Contactpersonen'. A large blue arrow points from the 'medi.connect' link to the 'Veroval®' logo. Another blue arrow points from the 'Veroval®' logo to the 'Veroval® MEDI.CONNECT' laptop image. The main content area features a photograph of a woman hugging a man. To the right of the photo, the text reads: 'Veroval®', 'BLOEDDRUK | ECG |', 'GEWICHT | ACTIVITEIT |', and 'ZELFTESTS'. Below this is a red banner containing two images: a laptop displaying 'Veroval® MEDI.CONNECT' and a person's arm with a blood pressure cuff. Below the laptop image is the text 'Veroval® MEDI.CONNECT' and below the blood pressure image is 'Veroval® BLOEDDRUK'.

# Klik op de medi.connect pagina op Veroval medi.connect login en download de software

Uw vitale functies in een klik



Login


Nu registreren



Download


Klik hier om de medi.connect software te downloaden

# Klik in het tabblad op 'save' en installeer het programma

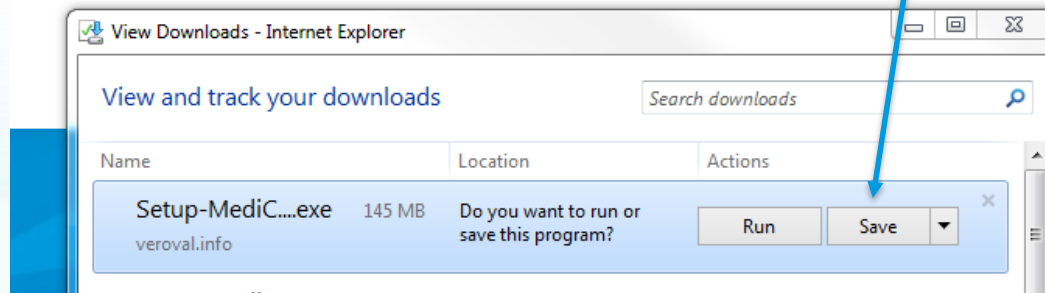


# Als het programma geïnstalleerd is, start u medi.connect d.m.v. een dubbele klik.

1. Kies de gewenste taal :

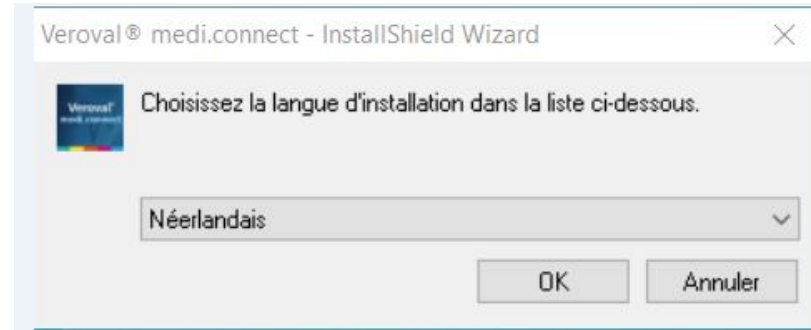


2. Aanvaard en valideer volgende tabbladen :

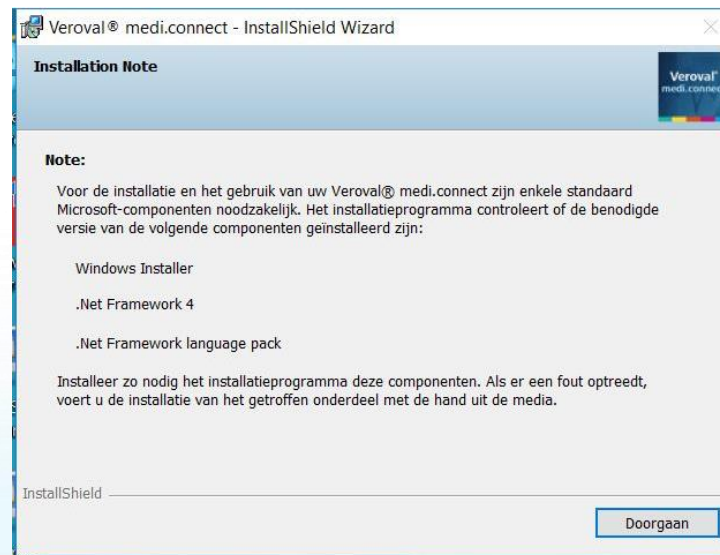

# Klik op voltooi en start het programma



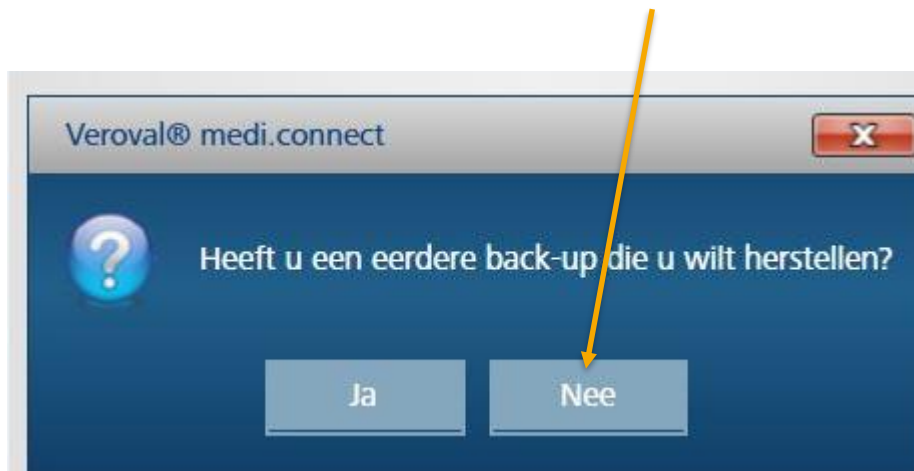

Uw account aanmaken: kies 'nee' als u nog geen profiel hebt gesaved.



# De volgende velden moeten worden ingevuld:

**Mijn profiel**    Systeem    Bloeddruk    ECG    Gewicht    Temperatuur    Herinneringen

**Mijn profiel**

Geslacht *	<input checked="" type="radio"/> Mannelijk <input type="radio"/> Vrouwelijk	Straat	<input type="text" value="de Belle Vue 16"/>
Voornaam *	<input type="text" value="Stéphane"/>	Postcode	<input type="text" value="6250"/>
Achternaam *	<input type="text" value="Huaux"/>	Stad	<input type="text" value="Presles"/>
Geboortedatum *	<input type="text" value="12-07-1969"/> <input type="text" value="15"/>	Leeftijd (jaren)	<input type="text" value="47"/>
Wachtwoord	<input type="password" value="*****"/>  	Lengte *	<input type="text" value="179"/> Centimeter




# Uw profiel op uw computer opslaan

Mijn profiel




Geslacht *	<input checked="" type="radio"/> Mannelijk <input type="radio"/> Vrouwelijk	Straat	de Belle Vue 16
Voornaam *	Stéphane	Postcode	6120
Achternaam *	Huaux	Stad	Nalines
Geboortedatum *	12-07-1969 <input type="text" value="15"/>	Leeftijd (jaren)	47
Wachtwoord	***** <input type="lock"/>	Lengte *	179 Centimeter

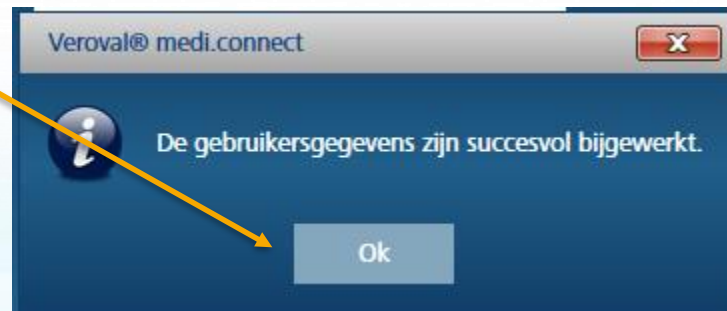\* = verplicht veld



Uw profiel online opslaan om te kunnen raadplegen op uw tablet, smartphone, andere computers, om de gegevens met uw arts te delen.

Mijn profiel

Geslacht *	<input checked="" type="radio"/> Mannelijk <input type="radio"/> Vrouwelijk	Straat	de Belle Vue 16
Voornaam *	Stéphane	Postcode	6120
Achternaam *	Huax	Stad	Nalines
Geboortedatum *	12-07-1969 	Leeftijd (jaren)	47
Wachtwoord	*****  	Lengte *	179 Centimeter

\* = verplicht veld

Klik op 'nieuwe gebruiker' en vul de verplichte velden in:  
E-mail, paswoord en paswoord bevestigen en klik op 'opslaan'

S'inscrire sur le site Web de Veroyal® medi.connect

Nouvel utilisateur  
 Utilisateur existant

Continuer Cancel

### Mon profil

Sexe \*  Masculin  Féminin Rue

Prénom \* Jade Code postal

Nom \* Huaux Ville

Date de naissance \* 15/02/1999  Âge (années) 18 Taille \*

Mot de passe \*\*\*\*\*

E-mail \*


Mot de passe \*

Confirm Password \*

\* = champ obligatoire

Nouveau Sauvegarder Annuler Supprimer le profil

Volgende vensters melden u dat uw gegevens op een beveiligde website online beschikbaar zijn:

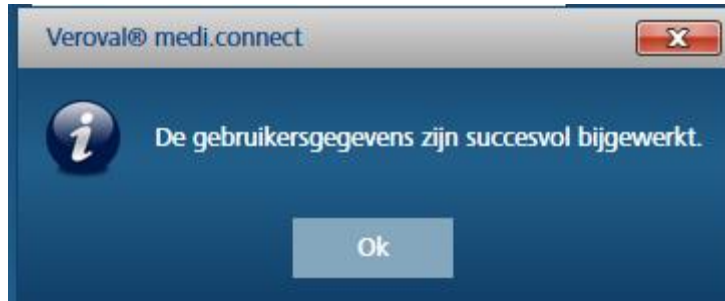

# Systeeminstellingen → systeem → systeeminstellingen

Veroval® medi.connect

Stéphane Huaux

HARTMANN

Overzicht Bloeddruk ECG Gewicht Temperatuur Zelftest Systeeminstellingen

Mijn profiel **Systeem** bloeddruk ECG Gewicht Temperatuur Herinneringen

Systeem

Systeeminstellingen

Taal Dutch

**Weergave**

Datum DD-MM-YYYY

Tijd 24 uur

Afmetingen Metrisch eenhedensysteem

**Update**

Automatische controle bij het starten van het programma

Opslaan

Beveiliging / herstel

‘Automatische controle bij het starten van het programma’  
aanvinken en opslaan.

# Controle van uw bloeddruk.

## 1. Systeeminstellingen: → Bloeddruk →: Bloeddruk: instellingen

- Wijzig de periodes : 's morgens – 's avonds : bijv. van 0:00 tot 11:59 en van 12:00 tot 23:59
- Uw apparaat aanvinken
- Opslaan

Veroval®medi.connect

Stéphane Huaux

Overzicht Bloeddruk ECG Gewicht Temperatuur Zelftest Systeeminstellingen

Mijn profiel Systeem Bloeddruk ECG Gewicht Temperatuur Herinneringen

Bloeddruk: instellingen

Periodes

Morgens (00:00 - 12:18) 's Avonds (12:20 - 23:58)

Apparaatkeuze



Tensoval Duo Control 2. Gebruikersgeheugen op het apparaat

Bovenarmbloeddrukmeter 1. Gebruikersgeheugen op het apparaat

Polsbloeddrukmeter


Opslaan Resetten Herstellen

Het is mogelijk dat het programma u vraagt de ontbrekende drivers te installeren: klik op « installeren »

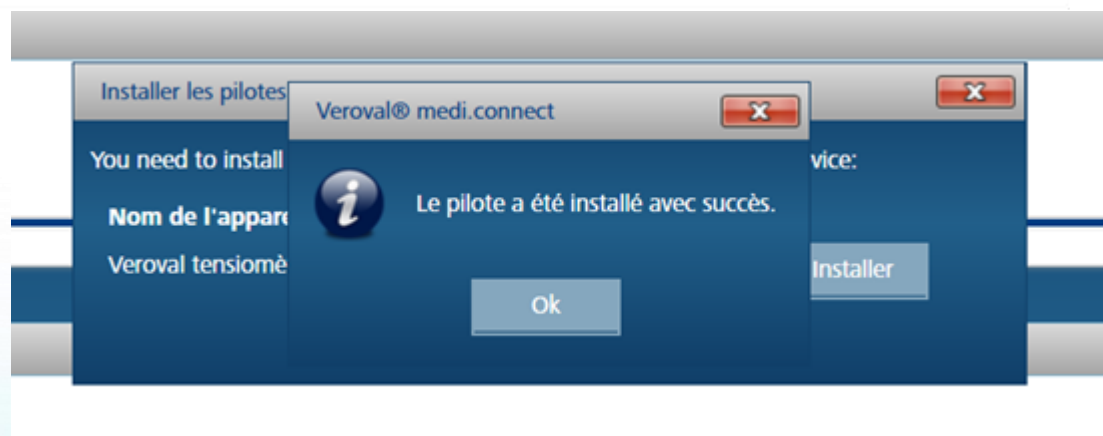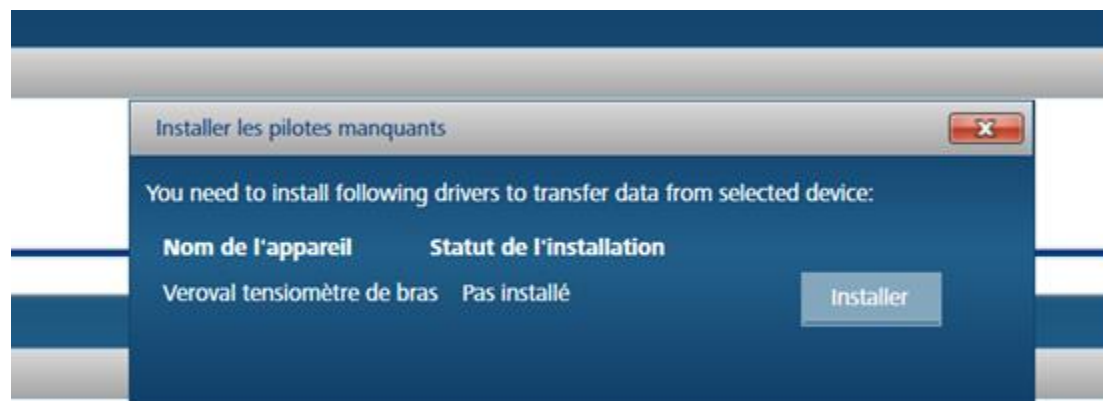

# Uw bloeddrukgegevens downloaden


1. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om uw bloeddrukmeter aan uw PC aan te sluiten
2. → Bloeddruk → downloaden 

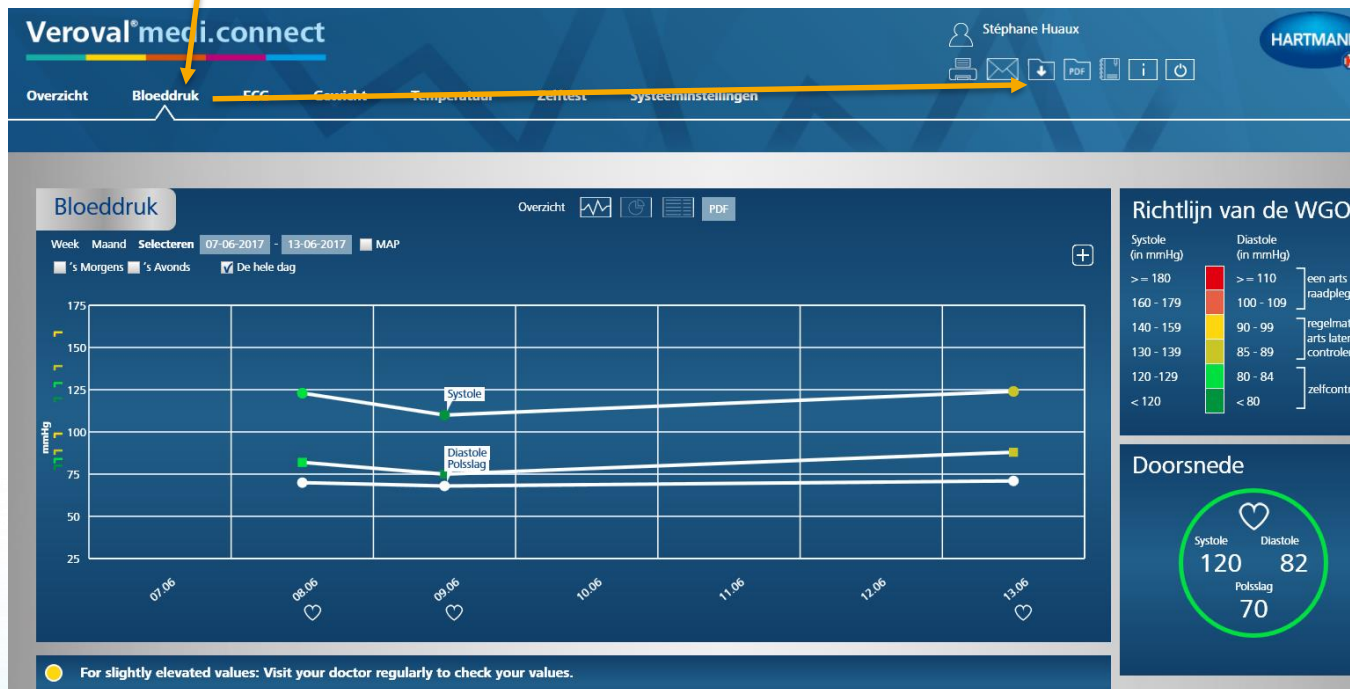




# Uw bloeddrukgegevens downloaden

3. Selecteer uw bloeddrukmeter door op het icoon te klikken

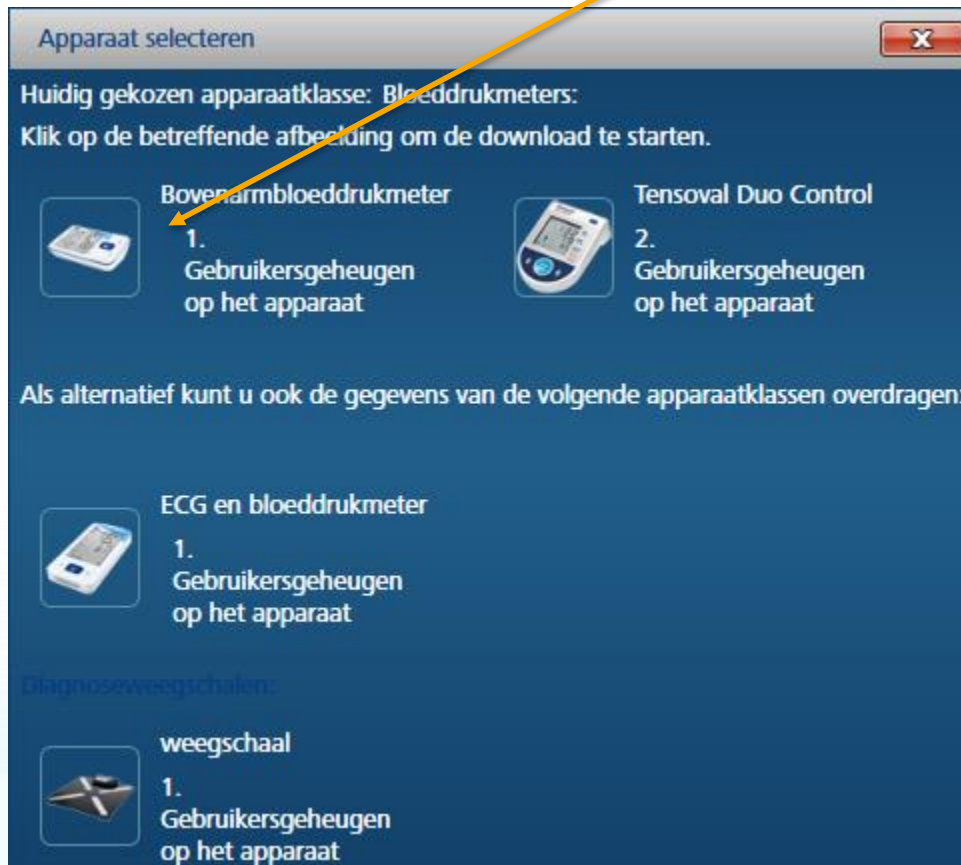


# Uw bloeddrukgegevens downloaden

De gegevens worden overgedragen:

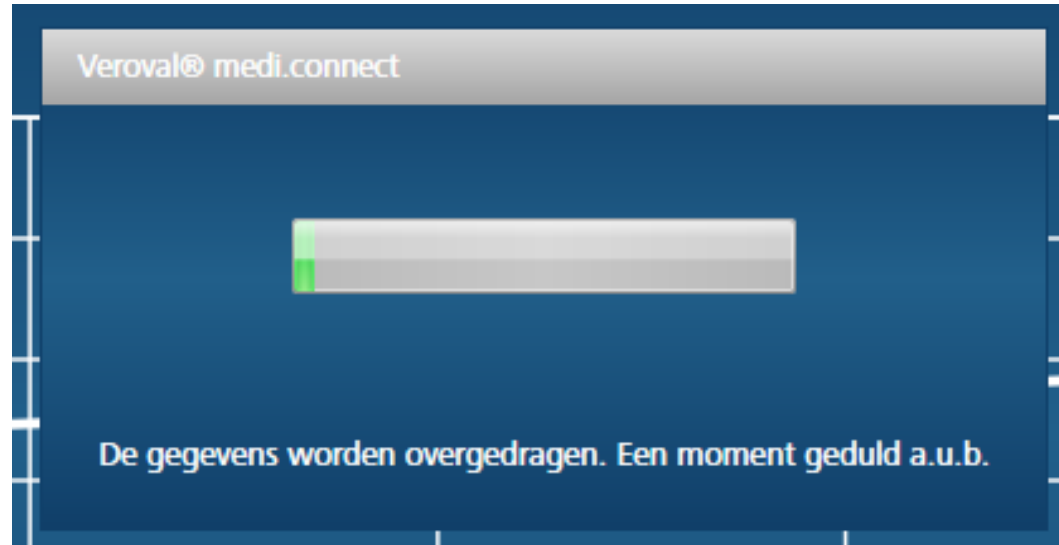

De gegevens opslaan:

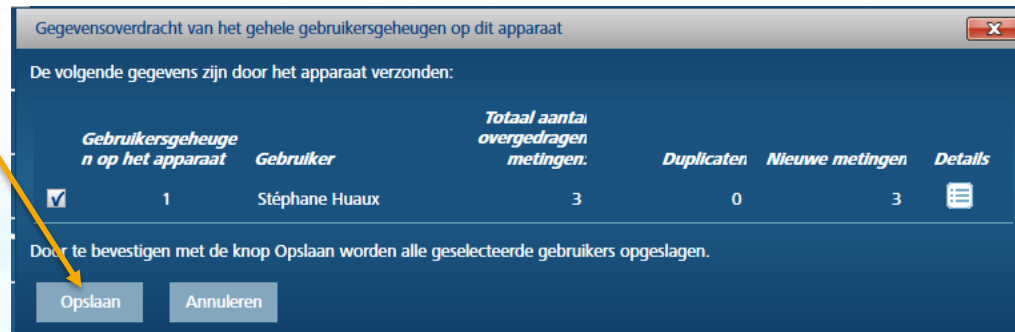


# Uw bloeddrukgegevens downloaden

Dit bericht bevestigt u dat de metingen succesvol zijn opgeslagen:



# Visualisatie van uw gegevens

Uw bloeddrukwaarden alsook uw hartslag worden grafisch voorgesteld. Het gemiddelde vindt u in het vak onderaan rechts.

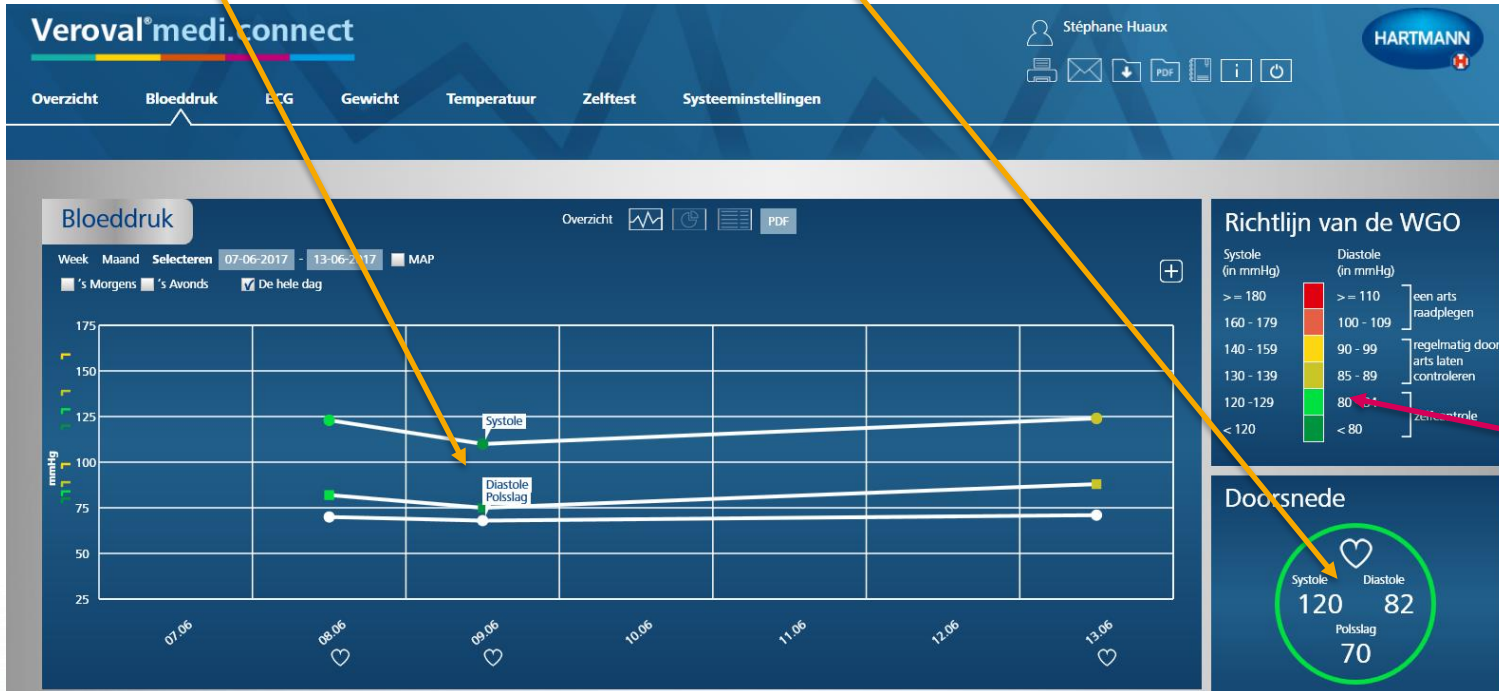

De kleur van de verschillende metingen duidt op graad van hypertensie

# ECG


## 1. Systeeminstellingen → ECG → Apparaat keuze

- Uw apparaat aanvinken
- Opslaan

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web application interface. At the top, the user's name 'Stéphane Huaux' is visible. The main navigation bar includes 'Overzicht', 'Bloeddruk', 'ECG', 'Gewicht', 'Temperatuur', 'Zelftest', and 'Systeeminstellingen'. A secondary navigation bar below it shows 'Mijn profiel', 'Systeem', 'Bloeddruk', 'ECG', 'Gewicht', 'Temperatuur', and 'Herinneringen'. The 'ECG' section is active, showing a sub-section titled 'Apparaatkeuze'. In this section, the option 'ECG en bloeddrukmeter' is checked, and a dropdown menu shows '1. Gebruikersgeheugen op het apparaat'. At the bottom of this section are 'Opslaan' and 'Resetten' buttons. Three yellow arrows indicate the navigation path: one from 'Systeeminstellingen' to 'ECG', one from 'ECG' to 'Apparaatkeuze', and one from 'Apparaatkeuze' to the 'ECG en bloeddrukmeter' checkbox.

# ECG gegevens downloaden

1. → ECG → Downloaden

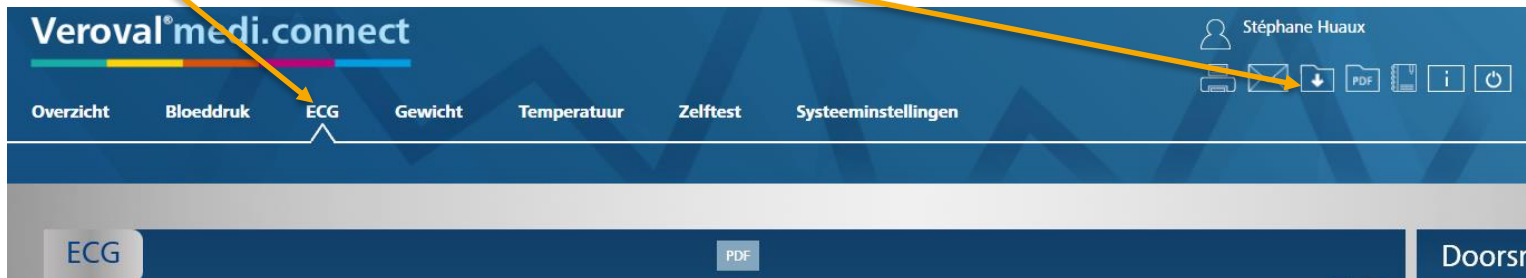

2. Tegelijkertijd, de meegeleverde Bluetooth adapter in een USB-poort van uw PC invoeren en uw ECG inschakelen door op de elektrode onderaan te drukken



# ECG gegevens downloaden.

3. Selecteer uw ECG door op het icoon te klikken







# ECG gegevens downloaden

4. Zodra uw ECG werd gedetecteerd wordt dit bevestigd in het volgend venster, klik onmiddellijk op het Bluetooth logo en controleer of uw ECG nog steeds is ingeschakeld (schakelt automatisch uit na 30 sec.)

5. Het volgend venster verschijnt, klik op downloaden

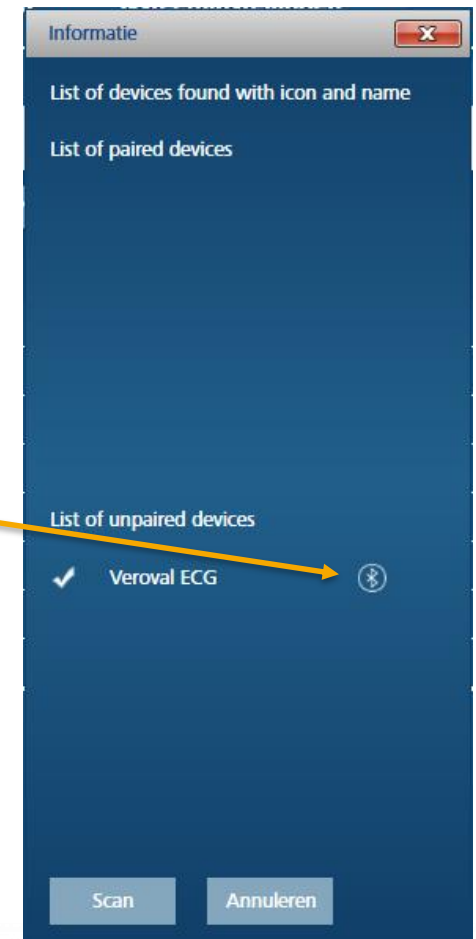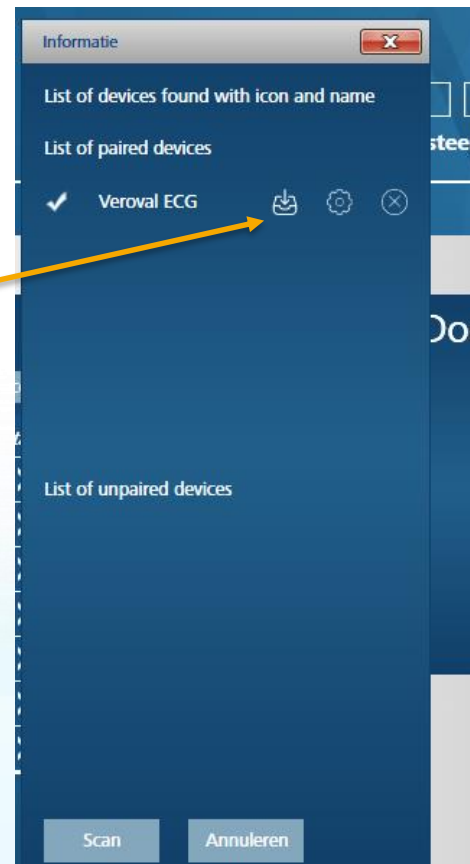



# ECG gegevens downloaden

## 6. De downloads opslaan :

Gegevensoverdracht van het gehele gebruikersgegevens op dit apparaat

De volgende gegevens zijn door het apparaat verzonden: *ECG*

<input type="checkbox"/>	<i>Gebruikersgegevens op het apparaat</i>	<i>Gebruiker</i>	<i>Totaal aantal overgedragen metingen:</i>		<i>Duplicaten</i>	<i>Nieuwe metingen</i>	<i>Details</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Stéphane Huaux	1		0	1	

Door te bevestigen met de knop Opslaan worden alle geselecteerde gebruikers opgeslagen.

De volgende gegevens zijn door het apparaat verzonden: *Bloeddruk*

<input type="checkbox"/>	<i>Gebruikersgegevens op het apparaat</i>	<i>Gebruiker</i>	<i>Totaal aantal overgedragen metingen:</i>		<i>Duplicaten</i>	<i>Nieuwe metingen</i>	<i>Details</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Stéphane Huaux	1		0	1	


Door te bevestigen met de knop Opslaan worden alle geselecteerde gebruikers opgeslagen.

# Weergave van uw ECG

7. Een tabel met een samenvatting van de metingen,



8. Door te klikken op « > », verschijnt het overeenkomstig ECG

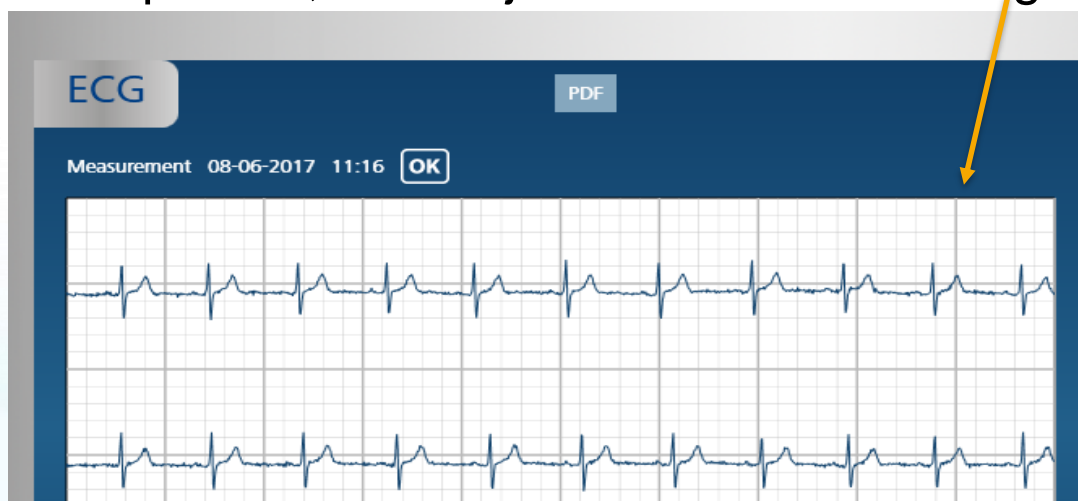

# Uw ECG gegevens downloaden

Indien het niet lukt om uw ECG met de Bluetooth adapter te detecteren sluit dan het Veroval®medi.connect programma en start het opnieuw. Controleer of u wel degelijk ECG hebt aangevinkt in punt 1 pagina 21.

Alvorens op het icoon te klikken (punt 3 pagina 23), voer de Bluetooth adapter in de USB-poort in en schakel uw ECG apparaat aan.

# Uw gewichts-en lichaamsanalyse downloaden

1. Systeeminstellingen → gewicht → weegschaal: instellingen → apparaat keuze
  - Uw apparaat aanvinken – selecteer het gebruikersgeheugen
  - Opslaan

The screenshot displays the user interface for weight scale settings. The top navigation bar contains the following items: 'Overzicht', 'Bloeddruk', 'ECG', 'Gewicht', 'Temperatuur', 'Zelftest', and 'Systeeminstellingen'. Below this, a secondary bar shows 'Mijn profiel', 'Systeem', 'Bloeddruk', 'ECG', 'Gewicht', 'Temperatuur', and 'Herinneringen'. The main content area is titled 'Weegschaal: instellingen' and features a section for 'Apparaatkeuze'. In this section, the 'weegschaal' option is checked, and a dropdown menu is set to '1. Gebruikersgeheugen op het apparaat'. At the bottom of this section are two buttons: 'Opslaan' and 'Resetten'. Three yellow arrows from the text above point to the 'Systeeminstellingen' menu item, the 'Gewicht' menu item, and the 'weegschaal' checkbox.

# Uw gewichts- en lichaamsanalyse downloaden

1. Op gewicht klikken en downloaden

**Veroval® medi.connect**

Stéphane Huaux  
M1 M2 M3 M4

Overzicht Bloeddruk ECG **Gewicht** Temperatuur Zelftest Systeeminstellingen

Gewicht Overzicht [Line Graph Icon] [List Icon] PDF

# Uw gewichts- en lichaamsanalyse downloaden

## 2. Klik op het icoon van uw weegschaal




# Uw gewichts- en lichaamsanalyse downloaden

3. Bij het volgend bericht sluit u uw afneembaar scherm aan uw PC aan door middel van de meegeleverde USB kabel. Antwoord vervolgens 'ja'



# Uw gewichts- en lichaamsanalyse downloaden

## 4. Uw gegevens worden gedownload

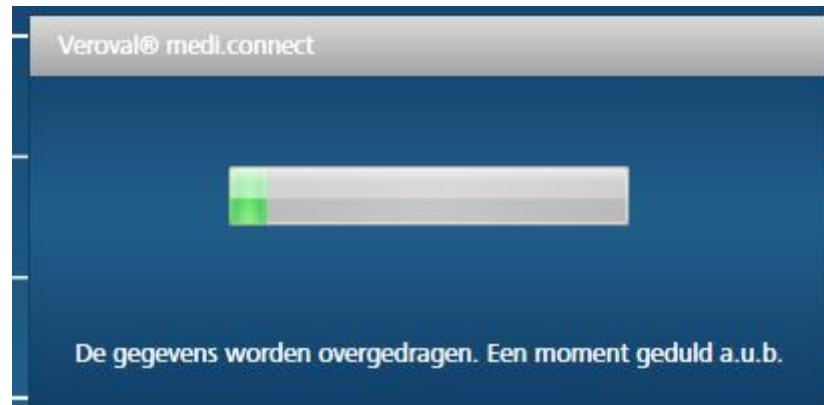



# Uw gewichts- en lichaamsanalyse downloaden

## 5. Uw gegevens opslaan

Gegevensoverdracht van het gehele gebruikersgeheugen op dit apparaat

De volgende gegevens zijn door het apparaat verzonden:

<i>Gebruikersgegevens op het apparaat</i>	<i>Gebruiker</i>	<i>Totaal aantal overgedragen metingen:</i>	<i>Duplicaten</i>	<i>Nieuwe metingen</i>	<i>Details</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Stéphane Huaux	2	0	2	
<input type="checkbox"/>	2 Niet aanwezig	1	0	1	
<input type="checkbox"/>	3 Niet aanwezig	1	0	1	
<input type="checkbox"/>	4 Niet aanwezig	2	0	2	


Door te bevestigen met de knop Opslaan worden alle geselecteerde gebruikers opgeslagen.

Veroyal® medi.connect

Les mesures ont été enregistrées avec succès.

# Uw gewichts- en lichaamsanalyse weergeven

6. Uw metingen worden grafisch weergegeven, het gewicht bovenaan en onderaan het percentage lichaamsvet.

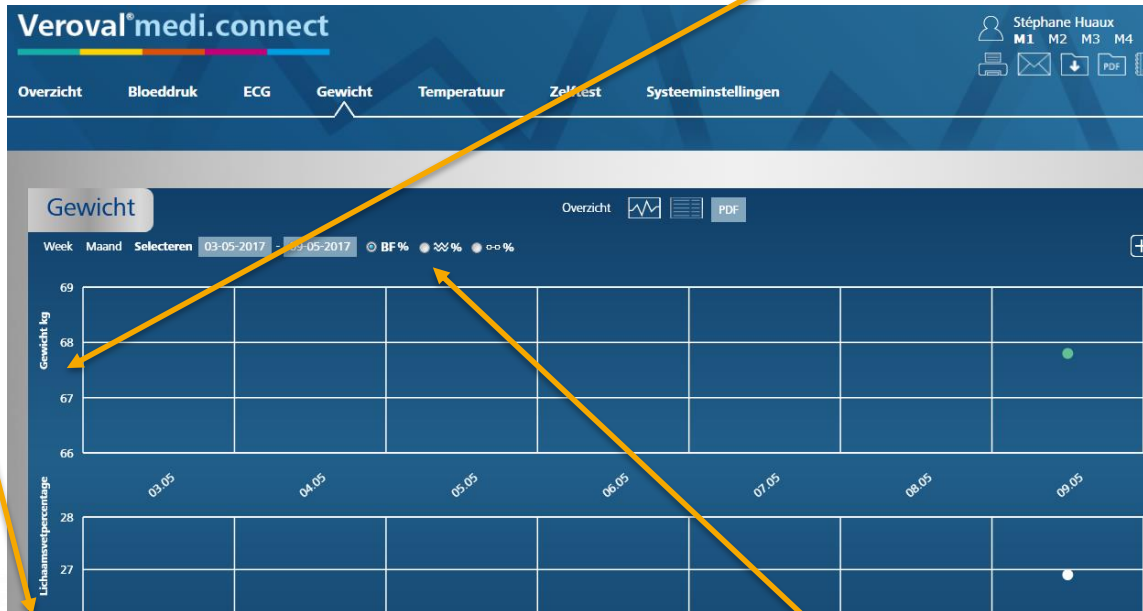


7. Door op de desbetreffende symbolen (zie hieronder vergrote versie) te klikken bekomt u de percentages lichaamsvocht en spiermassa



# Uw gewichts- en lichaamsanalyse weergeven

8. Uw BMI staat in kleur in de tabel van uw gewicht aangeduid en in het vak 'Doorsnede' staat de gemiddelde waarde

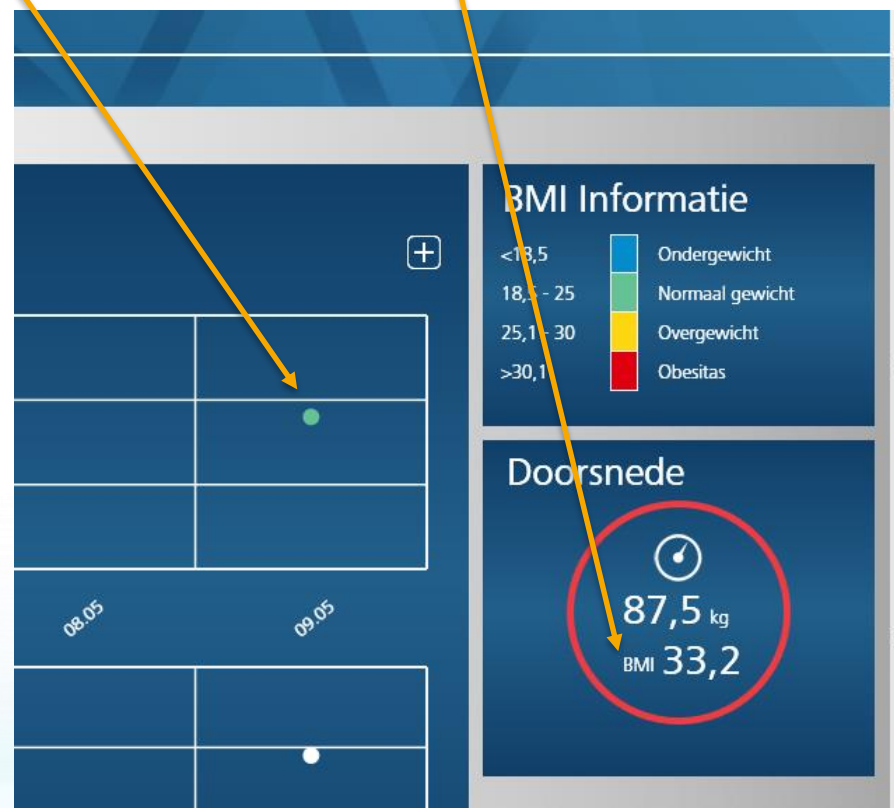

# Uw gegevens online synchroniseren - login

1. Als u uw gegevens op uw computer hebt overgedragen kan u deze beveiligd online synchroniseren om ze vanaf eender welke computer, tablet of smartphone te kunnen raadplegen (zie pagina 10)
2. In Systeeminstellingen → Mijn profiel, klikt u op 'Synchronisatie starten'


The screenshot shows the 'Veroval medi.connect' user interface. At the top right, the user is identified as 'Stéphane Huaux' with sub-accounts 'M1 M2 M3 M4'. A navigation bar contains tabs for 'Overzicht', 'Bloeddruk', 'ECG', 'Gewicht', 'Temperatuur', 'Zelftest', and 'Systeeminstellingen'. Below this, a secondary bar shows 'Mijn profiel', 'Systeem', 'Bloeddruk', 'ECG', 'Gewicht', 'Temperatuur', and 'Herinneringen'. The main content area is titled 'Mijn profiel' and contains a form with the following fields:

Geslacht	<input checked="" type="radio"/> Mannelijk <input type="radio"/> Vrouwelijk	Straat	de Belle Vue 16
Voornaam	Stéphane	Postcode	6250
Achternaam	Huaux	Stad	Presles
Geboortedatum	12-07-1969	Leeftijd (jaren)	47
		Lengte	180 Centimeter
Wachtwoord	*****		


At the bottom of the form, there are buttons for 'Nieuw', 'Opslaan', 'Annuleren', 'Profiel verwijderen', and 'Synchronisatie starten'. A legend indicates that an asterisk (\*) denotes a required field. Three yellow arrows are overlaid on the image: one points from the top right to the 'Systeeminstellingen' tab, another points from the top left to the 'Mijn profiel' tab, and a third points from the 'Mijn profiel' tab down to the 'Synchronisatie starten' button.

# Uw gegevens online synchroniseren - login

3. Via een venster kan u het verloop van de synchronisatie volgen en het bericht hieronder geeft u aan dat de synchronisatie succesvol is afgesloten.

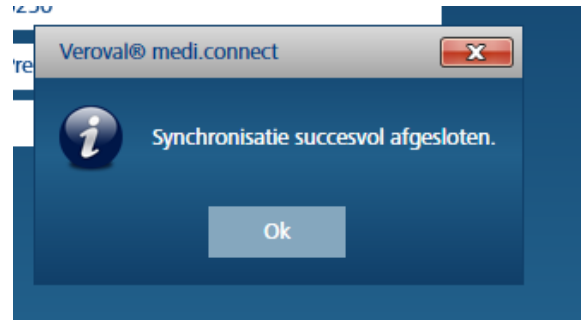

3. Voortaan kan u uw metingen online op uw tablet of smartphone raadplegen via de website <https://veroval-mediconnect.info/> . Selecteer uw taal en voer uw e-mail en paswoord in. Klik op 'login'.

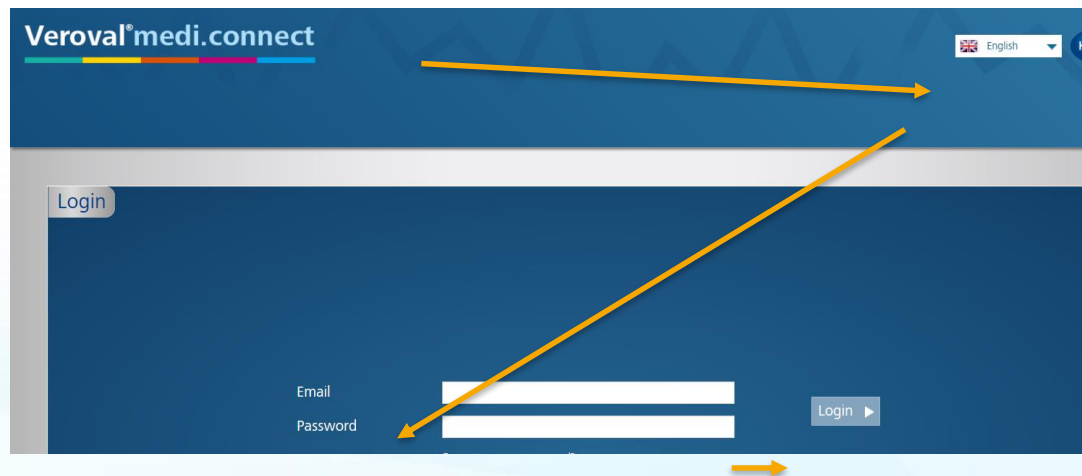

# Uw gegevens delen

1. Voor het delen van uw gegevens met uw arts, verpleegkundigen, zorgverleners, etc... of uw familie zijn er meerdere opties beschikbaar: u kan uw gegevens online visualiseren (zie pagina 36), printen of ze per e-mail versturen (zie pagina 41).
2. Om uw gegevens te printen hebt u de keuze tussen de analyse van al uw gegevens of slechts gedeeltelijk (voor een bepaalde periode), in 'Overzicht' – 'tijdstip', selecteert u de gewenste periode en klikt u op het icoon om te printen:

Veroval® medi.connect

Stéphane Huaux

Overzicht Bloeddruk ECG Gewicht Temperatuur Zelftest Systeeminstellingen

Laatste meting Laatste week Laatste maand Tijdstip

**Bloeddruk** 13-06-2017  
Systole 124 Diastole 88  
Polslag 71  
Waarden binnen het normale bereik: blijf a.u.b. uw waarden regelmatig thuis controleren.

**Gewicht** 11-06-2017  
97,3 kg  
BMI 38,9

**Temperat...** 12-06-2017  
36,5 °C  
's Morgens - 's Middags - 's Avonds 36,5 °C


**Zelftest**

Test	Datum	Resultaat	Laatste test
Cholesterol	12.06	●	-
Darm	08.06	●	-
Maag	08.06	●	-

**ECG** 13-06-2017  
OK SLOW FAST ERROR  
PAUSE RHYTHM WAVE  
Details bekijken

# Uw gegevens delen

3. In het volgend venster selecteert u welke gegevens u wenst te printen, als u bijvoorbeeld alles wilt printen laat u alle vakjes aangevinkt, indien u enkel uw bloeddruk wilt printen dan moet u alle andere vinkjes weghalen.
4. Klik op 'Voorvertoning' voor overzicht

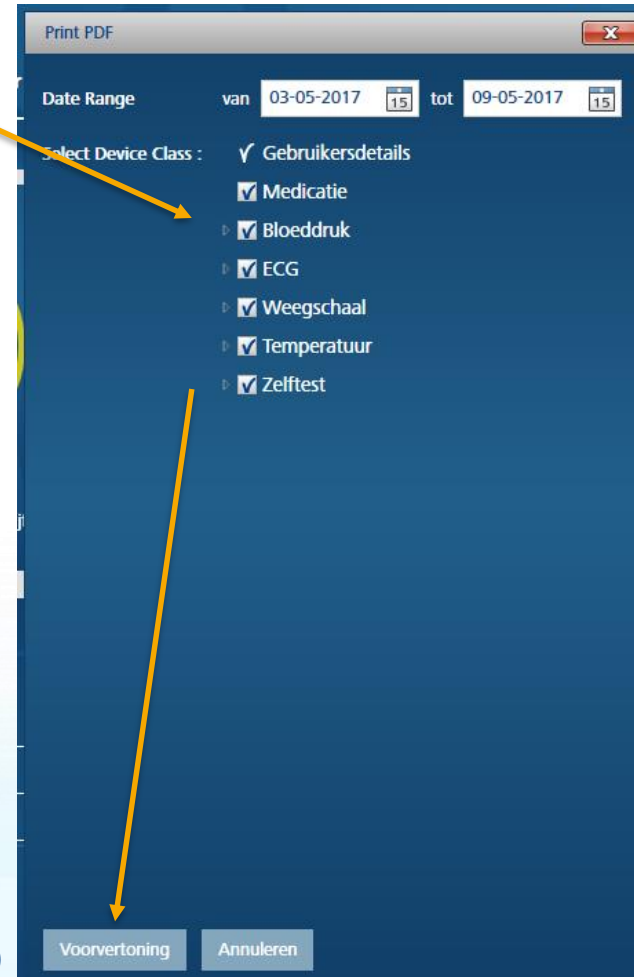

# Uw gegevens delen

5. Een printoverzicht verschijnt op het scherm, klik op 'afdrukken', selecteer uw printer en klik op print.

The screenshot shows a web application interface with a print preview window titled 'Voorvertoning afdrukken'. The preview contains a patient summary table and a 'Print' dialog box. An orange arrow points from the 'Afdrukken' button to the 'Print' dialog box, and another arrow points from the 'Print' dialog box to the 'Print' button at the bottom.

**Overzicht van de bloeddrukmetingen: 07-06-2017 - 13-06-2017**

Geslacht	Mannelijk	Straat	de Belle Vue 16
Voornaam	Stéphane	Postcode	6250
Achternaam	Huaux	Stad	Presles
Geboortedatum	12-07-1969	Leeftijd (jaren)	47
		Lengte	180
		Online dienst	


**Print Dialog Box (General):**

- Select Printer: BE-SAI-NP1003\_PS on BE-SAI-PRT01 (selected), BE-SAI-NP1004 on BE-SAI-PRT01, Brother MFC-990CW, Fax, Microsoft XPS Document Writer, Send To OneNote 2013
- Status: Ready
- Location: Common 2<sup>nd</sup> floor
- Comment: ADV 9200 PS
- Page Range:  All,  Selection,  Pages
- Number of copies: 1
- Collate
- Buttons: Print, Cancel, Apply




# Uw gegevens delen: per e-mail

Wij raden u aan uw gegevens per e-mail onder vorm van een PDF document te versturen. U bewaart dan dit document en stuurt het op in bijlage van uw e-mail.

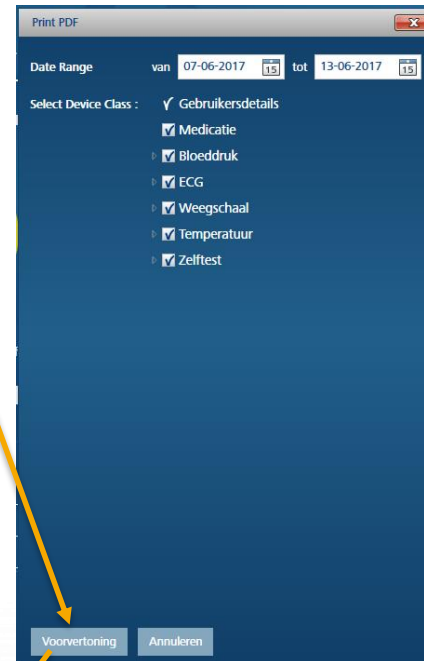

# Uw gegevens delen: per e-mail

Kies het bestand waar u uw document wilt bewaren en klik op 'save'.

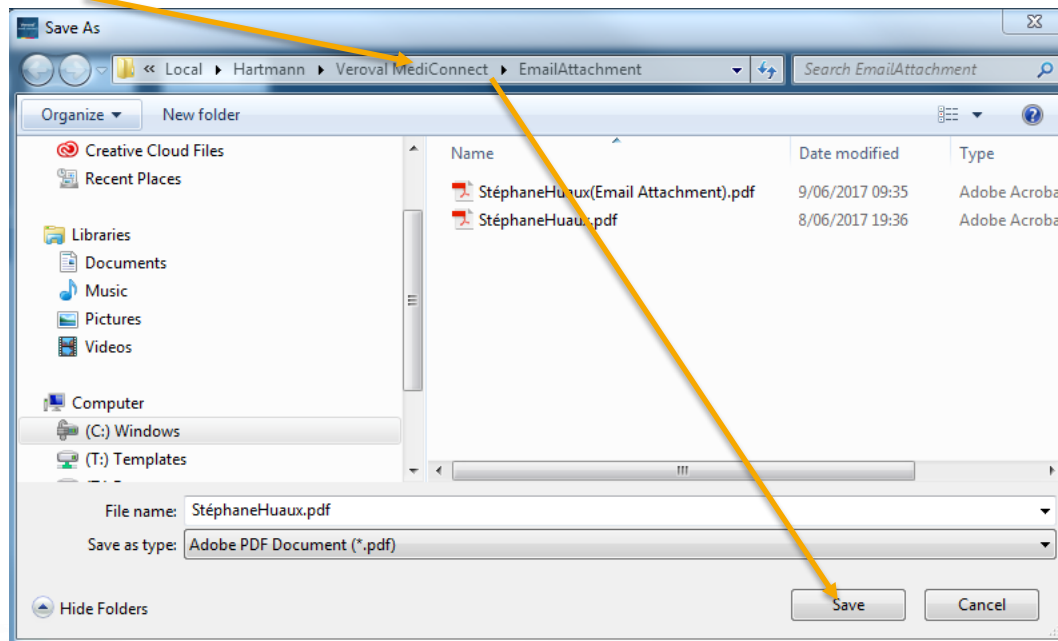

Vanuit uw e-mail bericht kan u dan dit document als attachment bij uw e-mail voegen .

# Uw gezondheidsparameters manueel invoeren

U kan ook manueel bepaalde medische parameters invoeren, bijvoorbeeld uw lichaamstemperatuur, uw cholesterolgehalte, de resultaten i.v.m. zelfdiagnose.

Bijvoorbeeld, tijdens de consultatie nam de arts uw bloeddruk en gaf hij u de resultaten van uw bloedafname. Om deze gegevens aan uw gegevens toe te voegen doet u het volgende:

\* in de tab "Bloeddruk", klikt u op het icoon



Veroval® medi.connect

Stéphane Huaux

Overzicht Bloeddruk ECG Gewicht Temperatuur Zelftest Systeeminstellingen

Bloeddruk

Overzicht [Line Graph Icon] [Clock Icon] [List Icon] PDF

Week Maand Selecteren 07-06-2017 - 13-06-2017 MAP

☐ 's Morgens ☐ 's Avonds ☑ De hele dag


Richtlijn v

Systole (in mmHg)

>= 180

# Uw gezondheidsparameters manueel invoeren

In het volgende venster voert u de gevraagde gegevens in en klikt u op 'opslaan'. U kan commentaar toevoegen en zelfs uw medicatie vermelden.

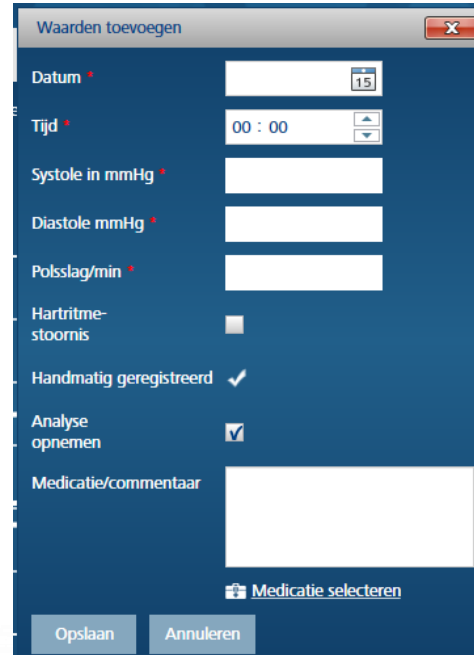

Dit gebeurt voor elk tabblad op deze manier. U kan ook vanuit uw dagboek deze informatie invoeren.

# Uw gezondheidsparameters manueel invoeren

Klik op



13 juni, 2017			
	10:34	124 / 88	Polslag : 71
	10:36	68	<input type="button" value="OK"/>

Kies waar u gegevens wilt bijvoegen en klik op 'opslaan'.

Waarden toevoegen

Categorie

- Bloeddruk
- Gewicht
- Temperature
- Cholestrole
- Intestine
- Maag

Medicatie innemen

Datum

Tijd

Medicatie

# Thank you

Meer info?

Neem contact op via :

[autodiagnostic.phbe@hartmann.info](mailto:autodiagnostic.phbe@hartmann.info)



Going further  
for health