



Reiniging- en opslagprotocol

Algemeen

- Om de levensduur van het matras en de matrashoes te garanderen, is het van belang om dit reinigingsprotocol te volgen.
- Het matras en IC-hoes zijn geen voedingsbodem voor micro-organismen en hoeven derhalve ook niet als dergelijk te worden behandeld.
- De matraskern is geschikt voor gebruik binnen een wasstraat.
- Desinfectantia met alcoholhoudende stoffen zijn toepasbaar op het matras zonder kwaliteitsverlies.

Het doel van het reinigen

- Het voorkomen van besmetting van de patiënt.
- Het voorkomen van besmetting van de medewerker.
- De conditie van de matrashoes behouden.

Dagelijkse schoonmaak

- Controleer op oppervlakkig vuil of andere ongewenste stoffen. Indien deze geconstateerd zijn, schoon maken met een natte schone doek die boven de 80 °c is gewassen. Indien nodig een desinfectant gebruiken.

Wanneer u gebruik maakt van een desinfectant controleer dan altijd of uw product bij deze onderstaande lijst staat. Zo niet neem dan contact met ons op, zodat we uw schoonmaakmiddel kunnen controleren. Overschrijd nooit de aangegeven dosering. Gebruik geen Jodtinktur.

Product naam	Hoeveelheid
Incidin Plus (Ecolab)	2%
Kodan Tinktur Forte (Schulke)	Puur
Mikrobac Forte (Hartmann)	4%
Sodiumhypochlorite (Standaard)	1000 ppm
Octenispert (spray) (Schulke)	Puur
P3-topax 66 (Ecolab)	5%
Sagrotan (spray) (Reckitt Benckiser)	Puur
Sanit P20 (Iberian Cleaning Expert)	Puur
Spring (kalle Original)	Puur
Sprint 200 (Diversey)	2%
Suma Bac D10 (Johnson Diversey)	1%
Surfa'Safe (Anios Laboratories)	Puur
Topmax 421 (Ecolab)	5%
Virkon (Du Pont)	10 g/l
Volvone (Oyar)	40%

Patient wissel schoonmaak

- Na iedere wisseling van patiënt dient de hoes schoon gemaakt te worden met een desinfectant.

Periodieke schoonmaak

- Minimaal 1x per jaar dient de hoes gewassen te worden. IC-hoes: tot 95°C. Stoffen hoes: tot 30°C.
- De standaard IC-hoes is niet geschikt voor gebruik binnen een wasstraat. Deron heeft hiervoor aangepaste IC-hoezen in haar assortiment.
- Wij raden u aan de kern minimaal eens per twee jaar (zonder hoes) te laten luchten/ventileren.

Opslag

- Voordat het matras wordt opgeslagen dient deze te worden schoongemaakt en gedesinfecteerd. Het matras kan daarna worden verpakt in plastic. De opslag moet uit een droge ruimte bestaan, waarbij blootstelling aan zonlicht vermeden dient te worden. Maximaal 15 matrassen op elkaar stapelen.

Product naam	Hoeveelheid
Actichlor Plus (Ecolab)	1000 ppm
Anios DDHS (Anios Laboratories)	Puur
B45 (Orochemie)	Puur
Bacillo1 30 Foam (Hartmann)	Puur
Clinell Sporidical Wipes(Garna Healthcare)	Puur
Chlor-Clean tablets(Guest Medical)	1000 ppm
Dettol (Reckitt Benckiser)	5%
Dismozon Pur (Hartmann)	4%
Formaldehyde (Pharmacy)	30%
Germatol (kiarah Chem)	5%
Hansamed (spray) (beiersdorf AG)	Puur
Haz-Tabs (Guest Medical)	1000 ppm
Hibicet (Molnlycke Health Care)	Puur
Incidin Extra N (Ecolab)	2%