

## Gebruiksaanwijzing Onderarmschalen :


Lees vóór het in gebruik nemen van dit product deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.

De onderarmschalen met verticale handvatten zijn ontwikkeld als oplossing voor gebruikers die niet met uitgestrekte armen kunnen lopen of voor wie het veiliger is op de onderarmen te leunen.

### ONDERARMSCHAAL

De onderarmschaal bestaat uit 3 delen:


1. Onderbuis met fixatie hendel(5).
2. Koppelstuk en armbandje met fixatie hendel(5).
3. Zijflappen.
4. Insteekbuis met handvat en remhendel.
5. Fixatie hendel.
6. Butterfly hendel.

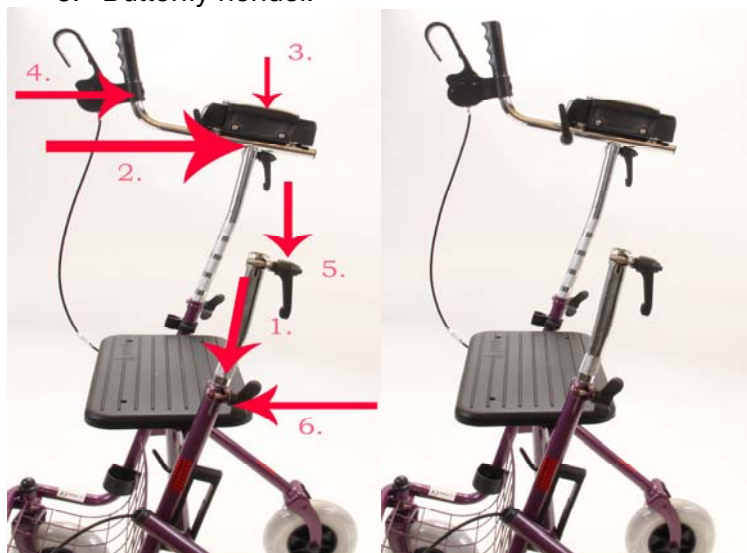

### PLAATSEN ONDERARMSCHAAL

Plaats de onderbuis (1) in de rollator zorg ervoor dat het bovenste gedeelte van de buis verticaal staat. Plaats de fixatie hendel(5) die op de buis zit altijd aan de buitenkant van de rollator. Draai de fixatie butterfly hendel(6) van de rollator vast.

Plaats nu het koppelstuk met armband(2) in de onderbuis(1) en zet deze in een hoek van 15(graden) naar binnen draaien. Door middel van de fixatie hendel(5) op de onderbuis zet u het koppelstuk(2) vast.

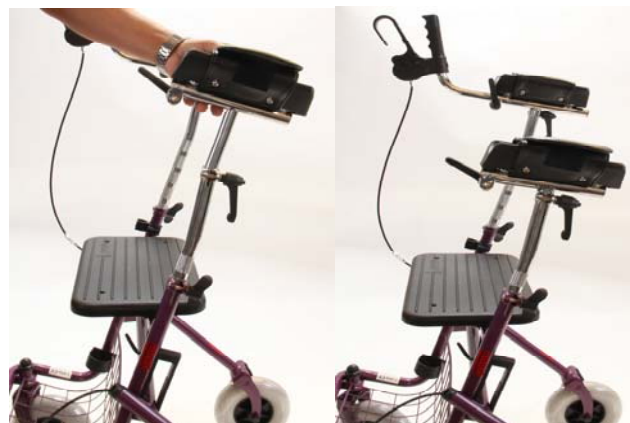

U kunt nu de insteekbuis met remhendel(4) in het koppelstuk(2) plaatsen. Doormiddel van de fixatie hendel(5) die onder het armbandje zit kunt u de insteekbuis(4) vast zetten.



Maak altijd gebruik van de Zijflappen(3) die op het armbandje(2) gemonteerd zitten.


### HANDGREPEN



Instellen hoogte van de onderarmschalen. Draai de fixatie Butterfly hendel(6) van de rollator los. Trek de onderarmschaal omhoog tot de gewenste hoogte, maximaal tot het gladde



Draai de fixatiehendel weer goed vast, zodanig dat de handgrepen niet meer bewogen kunnen worden.

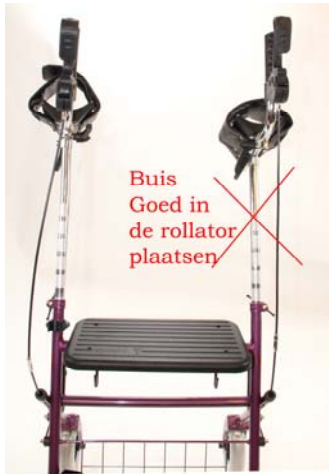

### GEbruik van DE PREMIS LOOP-PARKEERREM

**REMMEN:** Om te remmen met de Premis Loop Parkeer remmen. Knijp beide zwarte handremmen in.



**PARKEREN:** Druk de zwarte hendels naar beneden tot deze vast klikken.

Parkeerrem ontgrendelen. Knijp de beide handremmen helemaal in en laat deze weer los.

### DE PREMIS DRUKREM

**REMMEN:** Om te remmen met de Drukremmen. Oefen druk uit op handvatten om te remmen. Gewicht gebruiken om volledig tot stilstand te komen.



Voor een betere loophouding en meer comfort kunnen de handgrepen maximaal 15 graden naar binnen worden gedraaid (evenwijdig aan de stand van de fixatie hendel). Draai de fixatiehendel weer goed vast, zodanig dat de handgrepen niet meer bewogen kunnen worden

### JAARLIJKSE CONTROLE

Het verdient aanbeveling eens per jaar de draaiende delen te laten smeren, alle schroeven en moeren aan te laten draaien, de remkabels te laten controleren en af te stellen en de banden op slijtage te laten controleren. Hiermee blijft de goede werking van uw Delta/rollator gegarandeerd.

De Provo rollator kan met een zachte vochtige doek schoon gemaakt worden, eventueel kan er een huishoudschoonmaakmiddel gebruikt worden.

Schuurmiddelen en agressieve schoonmaakmiddelen tasten de kunststof onderdelen, de coating en de chroomlaag van de handvatten aan.

### KWALITEIT & KEURMERKEN

**GQ-KEURMERK** De Provo rollators voldoen aan de eisen van de normen EN 12182, EN 1285 en EN-ISO 11199-2.  
Goedgekeurd  
**KBOH TNO**



De Provo rollators, voorzien van Premis Loop parkeerremmen voldoen aan de KboH richtlijn L-01 en zijn GQ goedgekeurd.

Alle Provo rollators zijn voorzien van een CE label met relevante product informatie volgens onderstaand voorbeeld.

### GEbruikte MATERIALEN

Alle gebruikte materialen zijn te recyclen, vrij van PVC en vrij van giftige stoffen.

De Nort 20 - 3931 NG Woudenberg  
Telefoon: 033-2779191 - Fax: 033-2779190

Email adres: [verkoop@premis.nl](mailto:verkoop@premis.nl)

Web site: [www.premis.nl](http://www.premis.nl)



De Nort 20 - 3931 NG Woudenberg  
tel: 033-2779191 - fax 0332779190

email: [verkoop@premis.nl](mailto:verkoop@premis.nl) - website: [www.premis.nl](http://www.premis.nl)

