


GEBRUIKERSHANDLEIDING Freya Heup Airbag

STAP 1: Onderdelen checken

1. Heup airbag
 - Twee airbags (links en rechts)
 - Gasgenerator (midden)
 - Valdetectietoestel en batterij (midden, achter rits)
2. Adapter om batterij op te laden
3. Extra gasgenerator

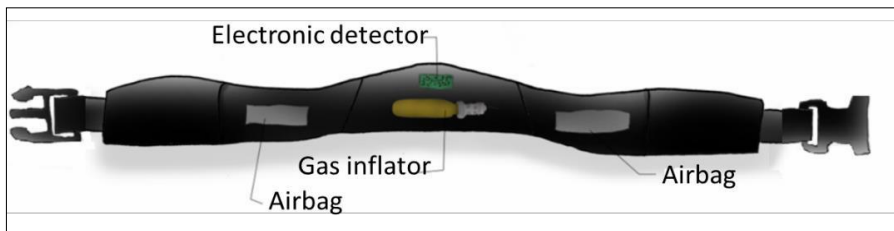

Gasgenerator/gasflesje



STAP 2: Batterij opladen

1. Plug de adapter in de riem, de plug bevindt zich aan de zijkant van de gesp
2. Plug de adapter in het stopcontact **LET OP: DE RIEM NIET SLUITEN**
3. Bij een groen licht is de batterij opgeladen, dit is na ± 3 uur
(De batterij gaat dan ± 60 uur mee vooraleer hij terug opgeladen moet worden)

STAP 3: Gebruiken van de riem

1. Controleer of de witte pijlen naar boven zijn gericht
2. Plaats de riem over de heupen en sluit de gesp, je zal een piepje horen
3. Controleer of het groene licht knippert **LET OP: PAS ACTIEF NA 30 SECONDEN**
4. Alarm?
 - Controleer of de gasgenerator of testconnector ingeplugd is
 - Controleer of de riem niet ondersteboven zit (pijlen)
5. Draai de riem om zodat de gesp zich op de rug bevindt



STAP 4: Hergebruiken van de riem

1. Open de buitenste, wasbare hoes
2. Draai de gasgenerator los en vervang deze (gasgenerator bevindt zich in het midden)
3. Plooi de airbags terug op **LET OP: BLAUWE KANT NAAR BINNEN OPROLLEN**
4. Sluit de wasbare hoes

BELANGRIJKE EXTRA INFO

- De riem niet in de lucht gooien wanneer gesloten
- De riem kan je verlengen via velcro-riem **LET OP: RODE DEEL BEDEKT HOUDEN**
- Vijf uur voor de batterij volledig plat is zie je een rood licht en hoor je elke tien minuten tien pieptonen
- Deze heup airbag is **niet voor personen met een neurodegeneratieve aandoening**
- Enkel de buitenste hoes mag nat worden, de heup airbag mag dus **niet in bad** gebruikt worden