


Oreiller positionneur contre les ronflements

Selon les études scientifiques, 55% des ronfleurs sont positionnels. Ils ronflent plus en dormant sur le dos que sur le côté. POSIFORM a un design anti-ronflement unique assurant une efficacité maximale.

Principe de fonctionnement

La forme de cet oreiller incite à dormir sur le côté avec la tête légèrement inclinée vers le bas. Dans cette position, la langue est légèrement poussée en avant par gravité pour assurer le dégagement du pharynx et une bonne respiration.

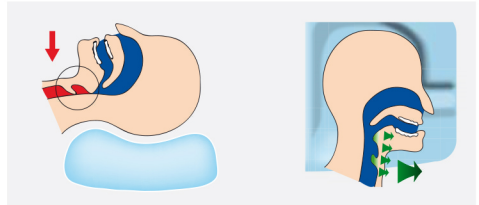

Indications

- Ronflement positionnel.
- Apnée légère et positionnelle, autorisation du médecin impérative.

Contre-indications

- Douleurs articulaires de la nuque.
- Sommeil très agité avec mouvements fréquents.

Efficacité

Très efficace en cas de ronflement positionnel et de sommeil stable.

Contenu

Réf. S-PSF

- 1 oreiller à mémoire de forme.
- 1 avec housse coton intérieure et housse bambou.

